

INSTRUCTIVO DE USO
LAGRIMAS ARTIFICIALES
SOLUCION OFTALMICA HIPROMELOSA 0,7%

Lea cuidadosamente este instructivo antes de la administración de este producto. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este instructivo porque puede necesitar leerlo nuevamente.

Descripción

Este producto es una solución oftálmica estéril, clara e incolora, donde cada frasco contiene 10mL de lágrimas artificiales.

Composición

Cada 100 mL de solución oftálmica contiene:
Hipromelosa (Hidroxipropilmetilcelulosa) 0,7 gr
Excipientes: Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Tetraborato disódico, Ácido bórico, Cloruro de benzalconio, EDTA disódico, Agua purificada c.s.p.

Acción terapéutica

Lubricante ocular

Indicaciones

Xeroftalmia (síndrome del ojo seco), irritación conjuntival crónica, irritación no específica del ojo, en procedimientos de gonioscopia, queratoconjuntivitis.

Contraindicaciones

Las lágrimas artificiales están contraindicadas en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

Advertencias

No para inyección. No tocar el dosificador con ninguna superficie, ya que esto puede contaminar la solución oftálmica. Se debe asegurar que el envase está intacto antes de su utilización. Se debe cuidar la higiene de manos al realizar la aplicación.

Remover lentes de contacto antes de usar. Si el paciente experimenta dolor ocular, cambios en su visión, continua el rojo o irritación ocular, o si las molestias empeoran o persisten por más de 72 horas se debe discontinuar su uso.

En caso de que usted experimente un efecto indeseable, que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este dispositivo médico, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado al Sistema de Tecnovigilancia del Instituto de Salud Pública.

Precauciones

Cerrar el envase inmediatamente después de su uso.
No dejar al alcance de los niños.
No utilizar el producto después de 30 días de abierto.

Reacciones adversas

En raros casos puede ocurrir irritación local o reacciones de hipersensibilidad. Puede causar escozor, visión borrosa temporal; adherencia del producto a las pestañas con sensación de pestañas "pegajosas".

Dosis y administración

1 a 2 gotas en el ojo afectado, 2 a 4 veces al día, o según lo indique su médico tratante.

Este producto se debe administrar exclusivamente por vía tópica ocular, aplicando las gotas en el fondo del saco conjuntival inferior del (de los) ojos afectado (s).

Instilar el colirio en el ojo, colocando el envase perpendicularmente a éste.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no exceda los 30°C.

Elaborado por Aurolab, 1 Sivagangai Main Road
Veerapanjan, Madurai - 625 020, India.
Mfg.Lic.Nº TNO002387

Importado en Chile por Pharmatech Chile S.A.,
Av. Vitacura 3565 Of. 1001, Vitacura, Santiago - Chile.
Almacenado y distribuido en Chile por Pharma Isa Ltda.,
Colo Colo 263, Quilicura, Santiago - Chile.

Mayor información en www.ispch.cl

INSTRUCTIVO DE USO - LAGRIMAS ARTIFICIALES

Formato 160x110 mm

Colores: 1/0

Tipografías: Univers Condensed Light c/6; Univers Condensed c/8, c/14

		APROBADO <i>Por Francisco Fuentes fecha 18:05 , 09/05/2016</i>
Gerencia General	Gerencia Marketing	Dirección Técnica