

FICHA TECNICA

SAF-GEL®

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Gel Hidratante con Alginato para heridas dérmicas
Nombre Comercial	SAF GEL®
Descripción	Gel hidratante con Alginato de Calcio Sódico. Estable hasta por 29
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc. - USA
Composición del Producto	Trietanolamina NF, Propilen Glicol USP, DMDM Hidantoina, Sorbato de Potasio NF, Acido Bórico NF, Carboximetilcelulosa de Sodio USP, Alginato de Sodio y Calcio, Carbomero 940 NF y Agua purificada USP
Características y Acciones del Producto	Hidratación del tejido seco: penetrando en el lecho de la herida e hidratándolo para favorecer el desbridamiento autolítico: remoción del tejido necrótico de forma natural y selectiva. Medio Ambiente Húmedo: propicio para favorecer la promoción y formación del tejido de granulación y epitelización. Mantiene el Ph ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Gel hidratante de alta cohesividad: Fácil de aplicar y permite su cubrimiento con gasa. El producto Saf-Gel es estable hasta por 29 días. Absorción de exudado moderado: Esta propiedad se la da la carboximetilcelulosa y el Alginato de Sodio y Calcio.
Usos	Gel hidratante para heridas en fase de debridamiento , fase de granulación y epitelización sin infección.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante. • La limpieza del lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia. • Aplicar una capa gruesa de Saf Gel® sobre el lecho de la herida plana o en el fondo de la lesión cavitada hasta tres tercios de su profundidad. • Cubrir con un apósito secundario que puede ser gasa vaselinada, DuoDERM CGF®. Para asegurar un mayor ambiente húmedo sobre el lecho de la herida. • En heridas superficiales como raspaduras y laceraciones se puede cubrir con una gasa. • Informar al paciente que en caso de heridas superficiales le puede causar un leve ardor que pasa rápidamente, esto por su contenido de Propilen Glicol. • Hacer cambios cada 3 a 5 días según necesidad. • Saf – Gel ,se mantiene activo hasta por 28 días, después de ser abierto el tubo.
Soporte Científico	Hydrogels & Hidrocolloids: An Objective Product Comparison Ostomy/Wound Management 1998:44(1): 36-53
Presentaciones:	Tubo x 85 grs. Caja x 1 tubo.

FORMATO DE CALIFICACION SAF-GEL®

Calificación de 1 a 5 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Desbridamiento Autolítico	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Absorción de Exudado	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad para mantener la humedad sobre el lecho de la herida	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Formación de Tejido de Granulación y epitelización	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de Remoción	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Soporte Científico de la Eficacia del Producto (Evidencia Clínica)	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio de Asesoría Profesional	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					

