

Ficha Técnica Flexi-Seal® Signal

Sistema para manejo y control fecal



BENEFICIOS

- Sistema para manejo y control fecal.
- Para desviar y contener deposiciones líquidas y semilíquidas.
- Protección de zonas quirúrgicas, lesiones por presión, quemaduras, etc. (desviando deposiciones).
- Para la administración de medicamentos por vía rectal.
- Bolsas con filtro de carbón anti-olores
- Uso hasta por 29 días.
- Control Clostridium Difficile



Marca: ConvaTec Limited
Fabricante: Fabricante: Fortune Medical
Instrument Corp. - Taiwan

Descripción

Cada Kit contiene un catéter de silicona suave, una jeringa, tres bolsas de recolección con filtro y una pinza de anclaje.

El catéter de silicona suave se inserta en el recto con el fin de contener y desviar las heces y con ello proteger la piel del paciente y mantener limpia la ropa de cama. En uno de los extremos hay un balón de retención y un conector para sujetar la bolsa de recolección en el otro extremo. Dos pequeños puertos están fijados al catéter de silicona. El puerto de color blanco, con la leyenda "45ml" impresa, es para insuflar el balón de retención luego de haber insertado el dispositivo en el recto del paciente; este puerto además posee un indicador táctil y visual del volumen óptimo de inflado. El puerto de color celeste con la leyenda "IRRIG" impresa, se utiliza para limpiar o irrigar el dispositivo en caso necesario y para administración de medicamentos vía rectal. Con sistema de toma de muestras, a través de abertura ubicado bajo los puertos, en el mismo catéter.

Recomendaciones de uso

- Llene la jeringa con 35- 45ml de agua o solución salina.
- Acople la jeringa a la conexión de insuflación.
- Acople con seguridad la bolsa de recolección al conector en el extremo del catéter.
- Ubique al paciente en posición decúbito lateral izquierdo. Proceda a un tacto rectal para evaluar que no exista impactación rectal.
- Despliegue el catéter para que se mantenga plano sobre la cama. Inserte el dedo índice enguantado dentro de la hendidura del balón de retención, aplique lubricante e inserte suavemente el balón de retención a través del esfínter anal.
- Infle el balón de retención con 45ml de agua o solución salina empujando lentamente el émbolo de la jeringa. NUNCA más de 45 ml.
- Retire la jeringa y tire suavemente del catéter de silicona blanda para asegurarse de que el balón se encuentre en el recto y situado en el suelo rectal.
- Si el catéter de silicona se obstruye con partículas sólidas, puede irrigarse llenando la jeringa y acoplándola a la conexión de irrigación.
- Cambie la bolsa de recolección con filtro cuando sea preciso.
- Para retirar el catéter del recto debe desinflarse el balón de retención. Acople la jeringa a la conexión de insuflación y extraiga lentamente todo el agua del balón de retención.
- Las deposiciones sólidas o de consistencia blanda no pueden pasar a través del catéter y obstruirán la abertura.

Contraindicaciones:

No puede utilizarse por más de 29 días consecutivos

No debe ser utilizado en pacientes pediátricos.

No utilizar con deposiciones sólidas o de consistencia blanda.

El sistema de control fecal Flexi-Seal™ SIGNAL™ no debe utilizarse en personas con: deterioro o posible deterioro de la mucosa distal, es decir, proctitis grave, proctitis isquémica o ulceraciones mucosas; intervenciones quirúrgicas en el recto en el transcurso del último año; • lesión rectal o anal; hemorroides de tamaño significativo y / o sintomatología; estrechez o estenosis rectal o anal; sospecha o confirmación de Tumor rectal / anal; un termómetro o cualquier otro dispositivo que deba insertarse en el recto, ni tampoco se podrán administrar supositorios o enemas a través de recto durante el tiempo que permanezca insertado el dispositivo; hipersensibilidad o antecedentes de reacciones alérgicas a cualquiera de los componentes del equipo

Composición del producto

- Balón de Catéter: Caucho de Silicona.
- Tubo de Catéter: Zeolita, caucho de Silicona y adhesivo.
- Adaptador-Cuerpo, Tubo y Brida: Polietileno de baja densidad.
- Bolsa de Recolección: Cloruro de Vinil etileno/ Polivinilideno acetato.
- Tapa Bolsa de Recolección: Plástico.
- Jeringa 45ml

Código ICC	Presentación
418000	1 KIT + 3 BOLSAS
411108	10 BOLSAS REPUESTO CON FILTRO