

3M Soluprep

Tórula impregnada con Solución Antiséptica

Ficha Técnica



Descripción

Torula impregnada con 1,6 ml de solución antiséptica de Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%.

Antiséptico de uso tópico para procedimientos quirúrgicos y heridas traumáticas poco profundas.

Antiséptico de acción rápida, efecto residual y de amplio espectro. Ayuda a reducir el número de bacterias presentes en la piel para disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico.

La cantidad de antiséptico presente en la torula permite la asepsia de superficies de 10 x 10cm.

Su presentación reduce el riesgo de contaminación y es fácil de usar.

Aprobado por el ISP
Reg. ISP N°: F-20893/14

Usos

Producto antiséptico efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, virus y hongos presentes en la piel, permite preparar la piel del paciente previo de un procedimiento quirúrgico como: Inserción de cateteres venosos periféricos, líneas arteriales medias, o para el mantenimiento de cateteres venosos centrales, sondas pleurales, sondas gástricas y catéter peritoneal, traqueostomías, toma de exámenes y hemocultivos, entre otros.

Para ser utilizado en los distintos servicios de Clínicas y Hospitales.

Empaque u otras referencias

Código Corto	Descripción	Medida	Empaque
10203	Soluprep Torula impregnada con solución Antiséptica Incolora	1,6ml	50 unds/caja

Beneficios

Recomendación para el uso:

El producto debe aplicarse frotando por ambos lados el torula, por 30 segundos en sitio secos. Y por 2 minutos en sitios húmedos del cuerpo, como por ejemplo la ingle. Esta acción promueve la compenetración entre la Clorhexidina y las capas de la piel, mejorando su eficacia. (Ver Cuadro)

Permita que el producto se seque completamente al aire antes de comenzar el procedimiento y antes de colocar apósitos transparentes.

Precauciones

No se recomienda su uso en menores de 2 meses.

Evitar el contacto con ojos, oído interno, mucosas y meninges.

No utilizar en personas alérgicas al gluconato de clorhexidina o al alcohol isopropílico.

No usar en piel dañada, usar sobre piel intacta.

Descontinuar la utilización en casos de sensibilidad de la piel.

Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota:

Producto de uso único.

El uso del producto debe cumplir con la indicación del fabricante. 3M no se hace responsable por daños derivados del uso indebido del producto.

Almacenamiento y Vida útil

Almacenamiento a no más de 25°C, alejado de fuentes de calor y en ambiente fresco.

Proteger de la luz

Caducidad en la etiqueta