
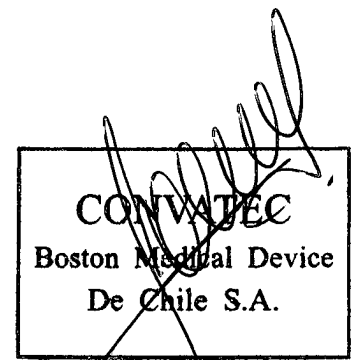


FICHA TECNICA

PLACA DE OSTOMIA SUR-FIT PLUS® MOLDABLE CONVEXA

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Placa de Ostomía Moldeable convexa. (sistema dos piezas)
Nombre Comercial	Placa Sur- Fit plus Moldeable convexa.
Descripción	Placa de ostomía moldeable convexa para utilizar en estomas protruidos y planos , que proporciona una seguridad adicional con mejoría de la flexibilidad y confort al adherirse suavemente a la piel periestomal. Con adhesivo microporoso , disco de protección cutáneo stomahesive , con aro de acople para bolsas Sur-Fit Plus. Y tecnología DuraHesive en el lado de la placa que no entra en contacto con la piel. Esta placa permite moldear (memoria de rebote) su abertura para que se ajuste a la forma y tamaño del estoma , sin necesidad de recortar , aportando una mejor protección frente a las fugas.
Marca	ConvaTec
Fabricantes	ConvaTec Inc. - USA
Composición del Producto	Placa Protectora de Piel Stomahesive® : Constituida en su parte central por Carboximetil Celulosa Sódica , pectina, gelatina, poli-isobutileno con soporte adhesivo hipoalérgico.
Características y Acciones del Producto	Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada. Ajuste a la forma de estoma : crea un sello tipo elástico que rebota para adaptarse a cualquier tamaño y forma del estoma y luego cuello de tortuga hacia arriba para aumentar el sellado. El resultado es un ajuste cómodo y seguro. Convexa : Forma de la placa facilita el ajuste en aquellos estomas de difícil manejo como son los estomas envaginados o planos , aportando una mejor protección frente a las fugas. Adhesión seco a Húmedo: La placa protectora de piel Stomahesive® se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel íntegra y protegida. Multimedidas:medidas para diferentes tamaños de estoma y con acople a bolsas Sur-Fit Plus.
Usos	Utilizable en Urostomías , Ileostomías, Colostomías protruidas o planas.

	❖ Para personalizar la abertura del estoma , coloque los dedos en el borde del orificio y comience a enrollar el adhesivo hacia atrás hasta crear una abertura del tamaño y la forma deseados. ❖ Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad. ❖ Centre la abertura sobre el estoma y presione el adhesivo en el sitio de colocación. ❖ Vuelva a moldear el adhesivo enrollado hacia el estoma, si fuera necesario ,para asegurar un ajuste apropiado entre el adhesivo y el estoma. ❖ Sostenga la placa protectora en el sitio de colocación por lo menos 30 segundos. ❖ Retire el papel desprendible blanco y presione el borde de la placa (marco poroso) contra la piel , alise cualquier arruga. ❖ Colocar bolsa de acople. ❖ Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa .
Presentaciones	Placa Sur Fit Plus Moldeable- Convexa Aro : ❖ 45 mm. (Small :13 -22 mm. y Medium: 22-33 mm.) ❖ 57 mm. (33-45mm.) 10 unidades x caja.

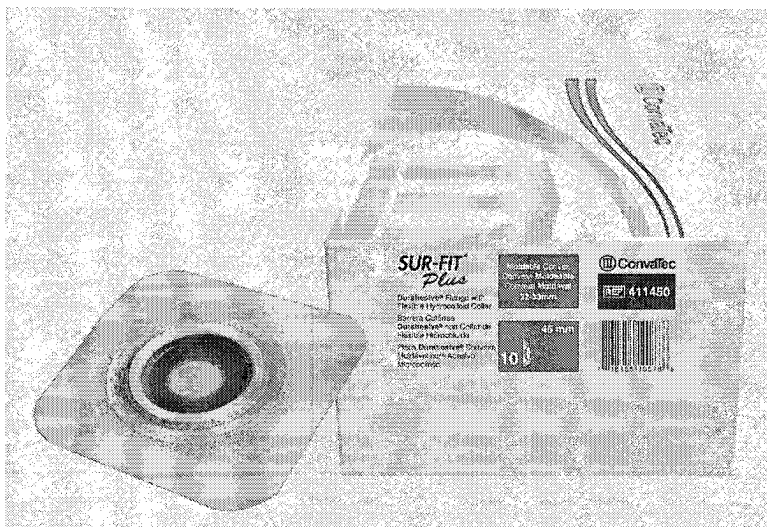

**FORMATO DE CALIFICACION
PLACA DE OSTOMIA SUR-FIT PLUS® MOLDABLE CONVEXA**

Calificación de 1 a 5: 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de colocación de la placa	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de adherencia	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de protección de la Piel	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ajuste a la forma del estoma	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de manipulación de la placa	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de remoción	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el paciente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Recomendaría el uso del producto	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calificación:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Observaciones:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Firma:					
Nombre institución donde se realiza la evaluación del producto :					
Fecha:					