

FICHA TECNICA

APOSITO DUODERM[®] SIGNAL CON BORDE PERFILADO CGF[®]

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Apósito con Borde Perfilado CGF[®]
Nombre Comercial	Apósito con Borde Perfilado CGF[®] DuoDERM[®] Signal
Descripción	Apósito oclusivo hidrocoloide con indicador de cambio impreso en la cara de poliuretano.
Marca - Proveedor	ConvaTec - Boston Medical device
Fabricante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Composición del Producto	<u>Sustancias Hidrocoloides</u> : Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina USP- Gelatina - <u>Soporte</u> : Película de poliuretano suave de baja fricción
Características y Acciones del Producto	Oclusivo: DuoDERM CGF es impermeable a los líquidos, los gases y los microorganismos incluidos los virus del SIDA y la Hepatitis, reduciendo los riesgos de invasión bacteriana y viral. Retiene el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo óptimo para el proceso de cicatrización. Mantiene el PH ligeramente Acido (5,0 – 6,0): reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Absorción de Exudado: las sustancias hidrocoloides tienen capacidad de absorber y controlar el exudado, permitiendo cambios de apósito entre 1 y máximo 7 días Impermeable a los Líquidos: reduce los riesgos de contaminación de la lesión en pacientes con incontinencia y mejora la calidad de vida del paciente, ya que le permite realizar el baño general en ducha sin necesidad de un cubrimiento adicional. Facilita la limpieza después de episodios de incontinencia. Indicador de cambio: Indican cuando se debe realizar el cambio, reduciendo el riesgo de derrames y daño de la piel sana. Bordes adelgazados: Permite una mayor adhesividad en los bordes. Reduce el enrollamiento del apósito y el recogimiento de los bordes. Translúcido: Facilita la aplicación del apósito en la herida y permite un fácil monitoreo de esta. Formas innovadoras: Disponible en formas especiales para el talón y la región sacra.
Usos	Úlceras y heridas con exudado moderado. Para usar especialmente en zonas del cuerpo de mucha fricción, presión y/o con riesgo de maceración de la piel perilesional.

Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. ❖ Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante ❖ Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con suero fisiológico al 0,9%, sin utilizar soluciones antisépticas. Secar bien la piel perilesional para asegurar la adhesividad del apósito a la piel sana. ❖ Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia o aplicar DuoDERM Gel ❖ Seleccionar un tamaño de apósito, que sea más grande que el área de la herida, asegurándose que el indicador de cambio sobrepase en al menos 2 cm los bordes de la misma. ❖ Cambiar el apósito cuando el exudado llegue al límite del indicador de cambio. Promedio de duración 2 a 7 días. ❖ Explicar al paciente las características del drenaje que se encuentra al retirar el apósito. ❖ NO cortar el apósito por que pierde el beneficio del borde adelgazado y el indicador de cambio ❖ NO utilizar el apósito en combinación con otros productos para el cuidado de las heridas no probados clínicamente por ConvaTec® y sin autorización médica.
	1. Day,A., Domdranski, B, Farkas, C., Foster, C., Godin, J. Managing Sacral pressure Ulcers with, hydrocolloid dressing: Results of a controlled, clinical study. Ostomy/Wound Management 1995; 41(2): 52-65 2. Harding K, Cutting K, Price P The cost- effectiveness of wound managemet protocols of care. Br J Nursing. 2000 (suppl) Vol 9, No19. 3. Kernstein M D, German E, Van Rijswijk L, Lyder CH, Phillips T, Xakells G Golden K Harrington C. Disease Management and Health Outcomes 2001;9(11):651-663
Presentaciones:	Apósitos de 10x10 cm – 14x14 cm – 20x20 cm - 18,5x19,5cm – 20x22,5cm Caja con 5 apósitos c/u.

FORMATO DE CALIFICACIÓN
APOSITO DUODERM® SIGNAL CON BORDE PERFILADO CGF®

(Calificación de 1 a 5) 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSITUCION

Concepto Técnico					
Oclusividad del apósito	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Adhesividad a los bordes	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Indicador de cambio					
Facilidad de Aplicación y Remoción:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Apósito:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Capacidad de Formación de Tejido de granulación y epitelización:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Adaptabilidad a zonas difíciles	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de monitoreo de la herida	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Comodidad para el Paciente:	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Facilidad de limpieza en caso de episodios de incontinencia.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Diversidad de formas y tamaños	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Impermeabilidad de la capa externa.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Presentación	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Calidad	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Empaque	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Servicio de Asesoría Profesional	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					