

División Hospitalaria

Apósito de Aseguramiento Avanzado Tegaderm™ I.V. Advanced 1683

25/03/2011

Ficha Técnica



Descripción

Apósito estéril transparente de poliuretano ranurado para estabilización de catéteres, con borde reforzado, marco de aplicación y tirillas de sujeción, que permite el intercambio gaseoso de la piel.

Características y Beneficios

- Su diseño estructural involucra un modelo en ranura, un borde reforzado en tela no tejida, y adhesivos sensibles a la presión, que brindan una mejor estabilización y aseguramiento del catéter reduciendo el riesgo de pérdida del dispositivo
- Tecnología adhesiva de confort que combina la acción de dos adhesivos hipoalergénicos de última tecnología, manteniendo un adecuado balance entre la adherencia, el cuidado y la protección de la piel
- Ideal para pacientes diaforéticos o sudorosos, o que se encuentren en ambientes húmedos
- Especialmente formulado para condiciones clínicas desafiantes en las que hay presencia de humedad en cantidades moderadas, por ejemplo fiebre o sudor
- Película de alta permeabilidad que garantiza un excelente manejo de la humedad bajo el apósito
- Aplicación del adhesivo en patrón de diamante, que reduce el área de contacto entre la piel y el adhesivo, sin comprometer su adherencia, garantizando la eficiente evaporación de la humedad
- Permite el intercambio gaseoso mientras protege el sitio de inserción de la contaminación exterior, incluyendo aquella más comúnmente asociadas a las infecciones sanguíneas relacionadas con los catéteres intravasculares¹
- Se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente, principalmente cuando el sitio de inserción está localizado en una zona desafiante para la permanencia del apósito, lo que reduce los riesgos de complicaciones tales como flebitis y desalojo o pérdida de línea vascular
- Su sistema de aplicación tipo marco facilita la colocación del apósito en forma precisa y segura, incluso con guantes evitando pérdidas del producto
- Por ser transparente, permite monitorear el sitio de inserción, sin necesidad de remover el apósito, lo que minimiza costos de insumos y tiempos de enfermería.
- Las tiras de sujeción adicionales se remueven fácilmente de la superficie del apósito, para permitir el acceso al conector sin necesidad de cambiarlo o removerlo. Contiene una etiqueta de identificación para el protocolo de cambio del apósito

Composición:

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
 - Adhesivo: Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
 - Tirillas y borde: Tela no tejida poliéster
 - Líner y Marco: Papel siliconado
 - Etiqueta Identificación: Cinta de Rayón
- No contiene látex*

Usos y aplicaciones

El apósito transparente de Aseguramiento Avanzado Tegaderm™ I.V., está recomendado para cubrir, proteger, asegurar y estabilizar múltiples tipos de catéteres intravasculares o dispositivos de uso médico, en condiciones de especiales como pacientes diaforéticos y/o condiciones de humedad elevada, en aplicaciones como:

- Catéteres venosos periféricos en pacientes adultos y pediátricos
- Catéteres venosos centrales en paciente pediátrico, incluyendo catéteres implantables, PICC y tunelizados
- Otros dispositivos intravasculares y Percutáneos
- Catéteres subcutáneos para administración de insulina
- Otros dispositivos de uso médico (drenajes, tubos, sondas)

Instrucciones de uso

Preparación del sitio

- Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de su institución.
- Recorte el exceso del vello del sitio donde se aplicará el apósito. No se recomienda afeitar.
- Asegúrese que la piel esté libre de jabones o antisépticos
- Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesión.
- Controle el sangrado del sitio antes de aplicar el apósito.

Aplicación

- Abra el empaque y retire el apósito para su aplicación
- Remueva el papel protector y exponga el adhesivo. Evite tocar el adhesivo.
- Sostenga el apósito desde el extremo donde se encuentran las tiras estériles, manteniendo el adhesivo hacia abajo. Doble levemente el apósito con el dedo pulgar
- Posicione la base del corte superior inmediatamente bajo el conector. Ajuste el apósito alrededor del catéter
- Aplique presión firme sobre la película para ayudar a la adherencia del apósito sobre la piel y el conector del catéter
- Posicione las aletas superiores del apósito por debajo del conector del catéter buscando que queden superpuestas y aplique presión firme
- A medida que retira lentamente el marco de aplicación, alise el borde del apósito sobre la piel con la punta de los dedos
- Retire las tiras adhesivas y aplíquelas en forma paralela y adyacente sobre el conector. Ajustelas alrededor del tubo. Marque y aplique la etiqueta de registro

Cuidado del sitio:

- Siga las precauciones estándares mediante un protocolo establecido para prevenir infecciones.
- Inspeccione diariamente el sitio por signos de infección u otras complicaciones.
- Si sospecha que hay infección, retire el apósito, inspeccione el sitio del catéter directamente, y determine la intervención médica más apropiada.
- El apósito se puede dejar hasta por un máximo de 7 días. El apósito debe cambiarse antes si su integridad se encuentra comprometida, o de acuerdo con los protocolos de cambio de la institución.²

Remoción del apósito:

- Retire con cuidado cada una de las tiras adhesivas del apósito.
- Tome la tela no tejida en ambos lados del corte superior y sepárelas
- Lentamente retire el apósito hacia atrás en 180° con la técnica de “bajo y lento” mientras estabiliza el catéter y la piel aledaña para evitar cualquier daño
- Sostenga la piel y el catéter al remover el apósito, para prevenir el daño en la piel o el desplazamiento del catéter.

Precauciones y advertencias

- Úse solo en puntos de inserción infectados bajo estricta supervisión médica
- Si el sitio de inserción se encuentra sangrando se recomienda el uso de un apósito con gasa²
- No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño mecánico a la piel.
- Las cremas antimicrobianas que contengan polietilenglicoles pueden comprometer el adhesivo de este producto
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.
- No utilizar el apósito en reemplazo de suturas u otros medios de cierre primario de las heridas
- Reemplace el apósito si este se afloja o se ensucia visiblemente²

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.

Vida útil del producto:

Los apósitos tienen 2 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	Referencia	Producto	Und. / Caja	Registro INVIMA	Clase Riesgo
702000762972	1683	Tegaderm™ I.V Advanced 6.5x 7.0cm	100	INVIMA 2005-0003443	Ila

-
1. Proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo Virus VHB y VIH,
2 Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País