

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™



Nueva cinta quirúrgica Medipore® H + Liner

Cinta quirúrgica de tela suave elástica, adhesiva y porosa, hipoalergénica con liner de respaldo. Puedes ajustarla a las necesidades específicas de cada paciente.

Características y beneficios

- Cinta con respaldo de tela suave no tejida que permite elongación moderada y se adapta a los contornos del cuerpo.
- Cuenta con líneas guías de corte que facilitan el dimensionamiento de la cinta en distintos tamaños y aplicaciones (liner).
- Brinda excelente adherencia sin dañar la piel, incluso en pieles de pacientes sudorosos.
- Permite la evaporación de humedad a través de la cinta.
- Suave con la piel, hipoalergénica y libre de látex.
- Es resistente al agua.
- No deja residuos al momento del retiro.

Beneficios

- **Respaldo:** Fibra no tejida de poliéster.
- **Adhesivo:** Acrilato. Hipoalergénico y sensible a la presión.
- **Liner:** Papel siliconado.





Usos y aplicaciones

La cinta médica Medipore® H + Liner está recomendada para fijar vendajes, inmovilización y uso general en aplicaciones como:

Curaciones generales, cirugía plástica, oftálmica, otorrino y curaciones menores.

Indicado en pieles delicadas o frágiles como las de pacientes pediátricos, geriátricos y oncológicos bajo quimioterapia o radiación.

Fijación de dispositivos en general, tales como líneas de catéteres centrales y periféricos, sondas, drenajes, tubos endotraqueales, entre otros.

Recomendado para fijación de vendajes con alta frecuencia de cambio.

Aseguramiento de los bordes de las bolsas de ostomías o dispositivos que lo requieran.

Instrucciones de uso

- Corte o adapte el tipo y el tamaño adecuado de cinta para la aplicación; la cinta debe exceder al menos 2 cm más allá del límite del apósito o dispositivo.
- Utilice las líneas guías de corte impresas en el liner para ajustar la cinta al tamaño requerido.
- Aplique la cinta siempre sobre la piel limpia y seca. Recorte el vello si es necesario.
- Desprenda el liner de la cinta, evitando tocar el adhesivo de la cinta.
- Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión.
- Si la cinta es colocada sobre una articulación posicione anatómicamente la zona del cuerpo antes de adherirla.

Para remover la cinta:

Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en técnica bajo y lento, en dirección al crecimiento del vello corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella.

Nota: El uso de películas protectoras sobre la piel del paciente antes de aplicar una cinta médica es recomendable para proteger la piel en el momento de la remoción.

Precauciones y advertencias:

- No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel.
- Las cintas médicas son productos limpios, pero no estériles; por lo tanto, no deben ser aplicadas directamente sobre sitios que requieren esterilidad.
- Elija la cinta adecuada de acuerdo a las características del dispositivo, la piel del paciente y el tiempo de aplicación requerido.

Almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15–30°C y 40-60% Hr.



3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001
Providencia, Santiago, Chile
Tel.: 600 300 3636
www.3msalud.cl

Código producto	3M Id	Descripción	Tamaño por unidad	Unidad venta	Unidades de productos
2862L	LH00001220	Medipore H + Liner 5 cm x 10 m	5cm x 10m	Caja	24 unidades
2864L	LH00001221	Medipore H + Liner 10 cm x 10 m	10cm x 10m	Caja	12 unidades
2865L	LH00001222	Medipore H + Liner 15 cm x 10 m	15cm x 10m	Caja	9 unidades