

Leukosan® Adhesive

Adhesivo de alta viscosidad para cierre de heridas.

Descripción

Es un adhesivo médico estéril de alta viscosidad utilizado para el cierre primario de heridas. Debido a esto, se puede aplicar con exactitud sin dispersarse. Al contacto con la humedad de la piel, polimeriza en pocos segundos, en una película flexible, adaptándose de forma segura a los bordes de la herida, protegiéndola de esta manera.

Características

- Cubre y protege la herida, actuando como barrera bacteriana.
- Adhesivo flexible.
- Resistente al agua.
- Aplicación sencilla y sin dolor.
- Polimerización rápida.
- Reacción exotérmica baja.
- No requiere vendajes de protección adicionales.
- Vigencia 2 años.
- Libre de látex.

Esterilización

Óxido de etileno.

Almacenamiento

A t° máxima de 30°C, evitando el calor excesivo y la humedad.

Recomendaciones de uso

Para uso en una o varias heridas en un mismo paciente. Es adecuado para cortes o laceraciones de bordes afrontable, así como para pequeñas incisiones quirúrgicas y pinchazos con bordes de herida fácilmente adaptables.

Composición

- Cianocrilato, compuesto por una mezcla de monómero de :
2-Octilcianocrilato y N-butilcianocrilato con 1 polímero de Octilcianocrilato.
- Tubos de aluminio sellado.
- Contiene dos tapas: tapa aplicador fino y tapa aplicador espuma.

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
72541-00000	LEUKOSAN ADHESIVE Adhesivo para cierre de heridas 0,7ml	Caja x 10 tubos
72541-00001	LEUKOSAN ADHESIVE Adhesivo para cierre de heridas 0,36ml	Caja x 10 tubos



Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad


ISO 9001 - ISO 13485 / CE



ADHESIVO DE ALTA VISCOSIDAD PARA CIERRE DE HERIDAS


Aplicación paso a paso Leukosan® Adhesive

PASO 1

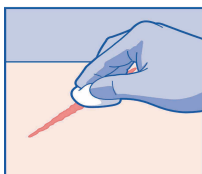

Limpiar y secar exhaustivamente la piel alrededor de la herida. Asegurarse que esté libre de grasa, aceite y disolventes.


PASO 2

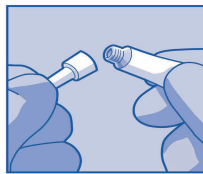

Abrir empaque estéril y retirar tubo y aplicadores. Escoger el aplicador apropiado, se sugiere utilizar primero la punta fina, seguida de una segunda aplicación con la esponja. Tomar el tubo por la parte inferior con la apertura hacia arriba y atornillar el aplicador escogido sin apretar el tubo.


Una vez que el adhesivo es visible en el aplicador, utilizar rápidamente.

PASO 3

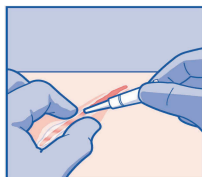

Aproximar cuidadosamente los bordes de la herida con pinzas o la mano enguantada. Ejerciendo una ligera presión y mediante un movimiento uniforme, aplicar una capa delgada sobre los bordes aproximados de la herida. Una capa es suficiente para alcanzar cierre seguro y permanente. Mantener borde unido por 25 segundos aproximadamente.

PASO 4

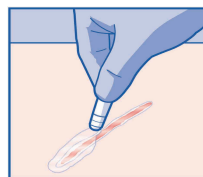

Después de la polimerización de la primera capa, aplicar una segunda capa delgada más amplia con el aplicador de esponja para crear una película protectora antimicrobiana. Una vez seco, se puede aplicar apósito tradicional, evitando que la parte adhesiva de éste tome contacto con el Leukosan Adhesive.

Leukosan® Adhesive

BSN medical