

Jeringa para insulina Ultra-Fine™

Jeringa para insulina Ultra-Fine™ 0.5 mL
Aguja longitud 8mm (5/16") Calibre 30G

CARACTERÍSTICAS

Descripción	Jeringa estéril, no tóxica, no reutilizable, con aguja de acero inoxidable de 8 mm x 30 G de pared delgada, tribiselada, lubricada y adherida de forma permanente al tambor de la jeringa. Dispositivo médico elaborado en polipropileno y acero inoxidable grado médico, doble tapón que garantiza esterilidad, de 0,5 mL x 8mm x 30G.	
Especificaciones	Color de Cilindro Material del Cilindro Lubricante del Cilindro Pabellón Adhesivo Embolo Pistón Funda Cánula Lubricante de la cánula Aguja Gauge de la aguja Largo de la aguja (pulgadas) Largo de la aguja (milímetros) Ingeniería de la punta de la aguja Pared de la aguja Capacidad de la jeringa Escala de la jeringa Esterilidad Modo de esterilización Técnica de esterilización Libre de látex	Claro Polipropileno Silicón grado médico Polipropileno Adhesivo de curado UV o epóxy Poliestireno Poliisoprenol – caucho SRB Poliétileno Virgen Acero inoxidable Silicón grado médico Integrada a la jeringa 30 G 5/16" 8 mm Triple bisel Delgada 0,5 mL 1 en 1 UL Nítida e imborrable Producto esterilizado Radiación Gamma Cobalto 60 Sí
Condiciones de almacenamiento	- Almacenamiento temperatura ambiente. - Se apilan y envían en APL (palets americanos, 36" x 48") con un máximo de 8 capas de cargadores de altura (14 cargadores/capa)	
Vida útil a partir de su fabricación	5 años siempre y cuando el empaque encuentre íntegro y libre de humedad.	
Instrucciones de uso	Para exponer el émbolo, gire el tapón blanco rompiendo el sello de seguridad y retírelo. Para exponer la aguja, gire la tapa naranja, rompiendo el sello de seguridad. Retírelo de una sola vez y tenga cuidado para no causar ningún daño en la aguja. Para obtener la dosis correcta: Empuje el émbolo hacia la punta de la jeringa. Hale el émbolo hacia abajo lentamente, alineando la línea negra delgada hasta el número de unidades deseadas en la jeringa. Use la jeringa una sola vez. No es recomendable su reuso, para prevenirlo descarte la jeringa y la aguja después de la inyección.	
Precauciones	A los pacientes que mezclan dos tipos de insulina se les recomienda: - No cambiar el orden de la mezcla que el médico haya prescrito. - No cambiar el modelo y marca de jeringa o aguja sin consultar primero a su médico. - Producto estéril, siempre y cuando los protectores de la aguja y el embolo no hayan sido removidos.	



Referencia: 328325

Presentación: Caja x 100 unidades
conteniendo 10 bolsas con 10 unidades

Fabricado por: BD Medical - Diabetes Care, 1329 West Highway 6, Holdrege, NE68949 USA. Elaborador Legal: Becton Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 SA. Importado y Distribuido por: Celnova Chile Spa. Venta Libre. Contacto: tecnovigilancia@celnova.com.

embecta, anteriormente parte de BD. BD es el fabricante de los productos anunciados. embecta y el logotipo de embecta son marcas comerciales de embecta Corp. BD y el logotipo de BD son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company. Todos los demás Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 2024 Embecta Corp. Todos los derechos reservados. Si tiene algún reporte de Tecnovigilancia comunicarse al e- mail: vigilancia_LATAM@embecta.com

