

APORTAS DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO

Detergente Enzimático pH Neutro para el lavado de Material Quirúrgico y Endoscopios

Descripción: El Detergente Enzimático Aportas es un detergente desincrustante líquido concentrado, neutro en base a tensoactivos aniónicos y no iónicos potenciado con enzimas específicas para todo tipo de suciedad.

Aportas Detergente Enzimático está diseñado especialmente para la remoción de suciedad orgánica, grasas, proteínas y carbohidratos, incluidos restos de fluidos biológicos.

El Detergente Enzimático está formulado para la limpieza manual de instrumental médico quirúrgico o en máquina automática para la limpieza de instrumentos endoscópicos, antes de la desinfección y esterilización de materiales de Hospital, Clínicas, Laboratorios, Centros dentales, Veterinarios, etc.

Beneficios

- Ayuda a degradar de mejor forma y más rápido la materia orgánica, mejorando la penetración del detergente en el instrumental.
- Aumenta la vida útil de los instrumentos.
- Evita el uso de múltiples detergentes.

Instrucciones de Uso:

Aplicar el producto diluido entre 0.3 y 0.5 % (3 a 5 cc/Lt. de agua).

Dejar actuar entre 10 a 20 minutos.

De ser necesario por nivel de suciedad ejercer acción mecánica con escobilla o esponja sobre las superficies expuestas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Enjuagar con agua corriente o blanda, secar.

Características Físico Químicas

Aspecto: Líquido transparente o levemente turbio, color amarillento, inodoro.

Peso Específico (20°C): 1.0 – 1.1

pH (20°C): 6.5 – 7.5

Contenido Tensoactivos: 14 – 15 %

Máximo umbral de efectividad enzimática entre 40 y 60°C

Vencimiento: 2 años. Observar etiqueta.

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado de la piel.

Usar medidas de protección apropiadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si hay contacto con los ojos, mucosas, enjuagar con abundante agua fría.

No ingerir, en caso de hacerlo dar a beber agua en cantidad.

Producto NO peligroso

Condiciones de Almacenamiento:

Almacenar en ambiente seco

Temperatura ambiente controlada entre 12 y 30°C

Evitar temperaturas mayores a 40°C

Presentación

5 litros – 1 litro con tapa sello que asegure inviolabilidad del contenido

Comercial Aportas S.A. Patricia Viñuela 485 –G Lampa

APORTAS

DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO

Detergente Enzimático PH Neutro para el lavado de Material Quirúrgico y Endoscopios.

Descripción: El Detergente Enzimático Aportas es un detergente desincrustante líquido concentrado, neutro en base a tensoactivos aniónicos y no iónicos potenciado con enzimas específicas para todo tipo de suciedad.

Aportas Detergente Enzimático está diseñado especialmente para la remoción de suciedad orgánica, grasas, proteínas y carbohidratos, incluidos restos de fluidos biológicos.

El Detergente Enzimático está formulado para la limpieza manual de instrumental medico quirúrgico o en máquina automática para la limpieza de instrumentos endoscopicos, antes de la desinfección y esterilización de materiales de Hospital, Clínicas, Laboratorios, Centros dentales, Veterinarios, etc.

Beneficios

- Ayuda a degradar de mejor forma y más rápido la materia orgánica, mejorando la penetración del detergente en el Instrumental.
- Aumenta la vida útil de los instrumentos.
- Evita el uso de múltiples detergentes.

Instrucciones de Uso:

Aplicar el producto diluido entre 0.3 y 0.5% (3 a 5 cc/Lt. de agua)

Dejar actuar entre 10 a 20 minutos

De ser necesario por nivel de suciedad ejercer acción mecánica con escobilla o esponja sobre las superficies expuestas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Enjuagar con agua corriente o blanda , secar.

Características Físico Químicas

Aspecto : Líquido transparente o levemente turbio, color amarillento, Inodoro.

Peso Específico (20°C): 1.0 – 1.1

PH (20°C): 6.5 – 7.5

Contenido Tensoactivos : 14 – 15 %

Máximo umbral de efectividad enzimática entre 40 y 60 °C

Vencimiento: 2 años .Observar etiqueta.

Precauciones

Evite el contacto prolongado de la piel .

Usar medidas de protección apropiadas .

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si hay contacto con los ojos, mucosas, enjuagar con abundante agua fría.

No ingerir, en caso de hacerlo dar a beber agua en cantidad.

Producto NO peligroso.

Presentación

5 litros – 1 litro con sello que asegure inviolabilidad del contenido.



Comercial Aportas S.A.
Patricia Viñuela N° 485-G Lampa