

Bolsa de Aspiración



Bolsa de aspiración descartable, flexible, de polietileno, con tapa sellada de polipropileno, sistema de válvula antireflujo y filtro que permiten minimizar el riesgo del personal al contacto con fluidos potencialmente contaminantes.

Características

- Filtro hidrófobo que actúa como combinación de filtro antibacteriano y protección contra desbordamiento.
- Válvula antireflujo unidireccional en puerto de entrada de paciente.
- Carros con capacidad de aspiración de hasta 18 litros con opción de aumentar hasta 36 litros.
- Sistema en serie opcional que permite optimizar los tiempos en pabellón, recomendado para cirugías de alto flujo.
- Asa de agarre que permite retirar la bolsa con suavidad tras su uso.
- Sistema de conexión único patentado que garantiza una instalación libre de errores.
- Envase compacto que permite un almacenaje más eficiente.

Indicaciones

- Recolección de fluidos en diversos tipos de cirugías y procedimientos médicos y de enfermería.



Instrucciones de uso

1. Retire la bolsa de la caja dispensadora sin necesidad de estirla.
2. Inserte la bolsa de aspiración en el canister. Ambos deben tener la misma capacidad.
3. Confirme que los puertos no utilizados estén completamente cerrados antes de iniciar la aspiración.
4. Una vez puesta la bolsa dentro del canister, active la aspiración y sin la necesidad de presionar la bolsa, coloque su dedo suavemente en el medio de ésta.
5. Una vez que la bolsa se haya expandido dentro del canister, coloque su dedo en el puerto del paciente, hasta que la bolsa se ajuste completamente.
6. Si la conexión es en serie, repita el mismo procedimiento para cada una de las bolsas.
7. Conecte el tubo de silicona al puerto de conexión del paciente, ubicado en la tapa de la bolsa de aspiración.

Retiro del dispositivo

1. Sin apagar la aspiración, desconecte el tubo conector y retire el sistema de conexión blanco ubicado en el puerto del paciente.
2. Desprenda el tapón adosado en la orilla de la tapa de la bolsa y tape el puerto del paciente, presionando hasta que escuche un clic.
3. Si la conexión está en serie, repita el mismo procedimiento para cada una de las bolsas, sin apagar la aspiración.
4. Agarre la bolsa del asa, sujetando el canister y retire la bolsa suavemente.
5. Realice la eliminación de la bolsa de aspiración, según los protocolos establecidos por su institución.

Bolsa de Aspiración

Advertencia

- No reutilizar o esterilizar.
- No utilizar en drenajes pleurales o torácicos.
- Antes de usar, verifique la indemnidad del producto.
- La bolsa de aspiración debe usarse con el recipiente rígido correspondiente a su tamaño.

Composición

- Bolsa de polietileno, con tapa de polipropileno.

Almacenaje

- Proteger de la congelación.
- Evitar el calor excesivo. Mantener seco.
- Proteger de la luz directa del sol, iluminación fluorescente, los Rayos-X, la humedad y el ozono.
- No almacenar a temperaturas superiores a 25°C.

Producto no estéril.

Presentación

- 1000cc, Cartón con 216, 6 cajas con 36 unidades.
- 2000cc, Cartón con 144, 6 cajas con 24 unidades.
- 3000cc, Cartón con 144, 6 cajas con 24 unidades.

Certificados

- ISO 13485
- ISO 9001

Marca

SERRES.

Fabricante

Serres Oy
Keskustie 23, FIN-61850
Kauhajoki as., FINLAND

Distribuido por:

Comercial LBF Limitada.



LOTE REF

	Código LBF	Código Ref	Descripción	Unidad de venta
	002-00056	57157-3	Bolsa Aspiración Serres 1000 ml C/Válvula Ar	Caja x 216 unidades
	002-00057	57167-3	Bolsa Aspiración Serres 2000 ml C/Válvula Ar	Caja x 144 unidades
	002-00058	57187-3	Bolsa Aspiración Serres 3000 ml C/Válvula Ar	Caja x 144 unidades