



Set de extensión doble con conector libre de agujas BD MaxZero™



Descripción

El conector estéril BD MaxZero™, es un **conector de un solo uso**, indicado para el **acceso libre de agujas** a conexiones/catéteres durante la terapia endovenosa. Puede ser utilizado para inyección directa, infusiones intermitentes, continuas o aspiración.




Aspectos Técnicos

El set de extensión doble con conector libre de agujas BD MaxZero™ **es un dispositivo cerrado luer activado** que ayuda a la reducción de los accidentes cortopunzantes. El flujo a través del dispositivo se activa al conectar una jeringa o sistema de administración intravascular. Posee un **mecanismo antirreflujo**, con el que tras la desconexión luer macho del dispositivo, el fluido se expulsa desde la punta del catéter hacia la circulación, lo que evita que sangre ingrese hacia este. Dada su tecnología, este conector no necesita una técnica de pinzamiento específica. El **conector libre de agujas BD MaxZero™** cuenta con una superficie sólida, lisa y sellada patentada, para una desinfección efectiva en tres segundos. Esta característica tiene como objetivo, reducir la posibilidad de que la vía intraluminal pueda contaminarse. El set se conecta al dispositivo vascular a través de un conector spin lock, que luego se divide en dos extensiones minibore de policloruro de vinilo (PVC) con adipato de dioctilo (DOA), cada una con un clamp de polipropileno con polietileno de alta densidad (HDPE). Cada extensión cuenta con su propio conector BD MaxZero™ con **carcasa transparente** para la visualización del fluido. Sin espacio muerto ni intersticial. **No hemolítico**. Su intervalo de recambio es de 7 días/200 activaciones. Compatible con lípidos. Soporta presiones de hasta 325 psi y puede ser conectado a máquinas inyectoras de alta presión a una velocidad de 10 mL/seg. Volumen de cebado de 0.8 ml. **No pirogénico**.

NOMBRE:	BD MaxZero™
TIPO:	Conector libre de agujas
PRESENCIA DE DEHP:	No
MATERIAL:	Pistón silicona/carcasa policarbonato
ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio y seco, a temperatura ambiente y sin exposición a luz fuerte.
PRESENTACIÓN:	Empaque individual
FABRICACIÓN:	México

Método de esterilización Radiación ionizante	Vigencia 3 años
 Libre de Látex	 Certificación

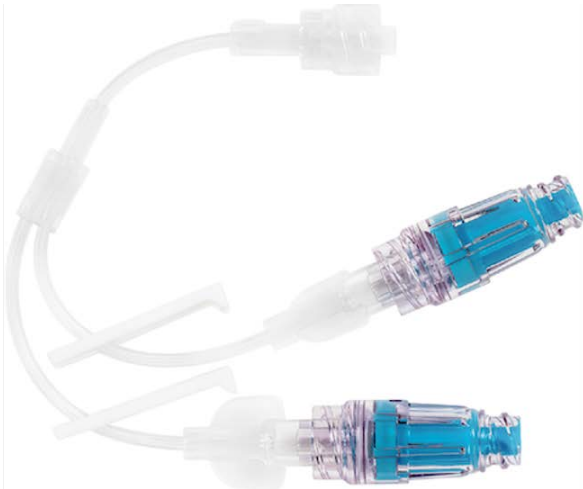

Set de extensión doble con conector libre de agujas BD MaxZero™

Catálogo Chile

SKU	Descripción de producto	Uso con inyectora de alta presión	Flujo por gravedad	Unidades por caja
MZ5307	Extensión de 2 puertos minibore 0.042" 18cm	Hasta 325 PSI	3.17 L/Hr	50 unidades

