




Attest 1262P

Control Biológico Vapor

Lectura 48 horas

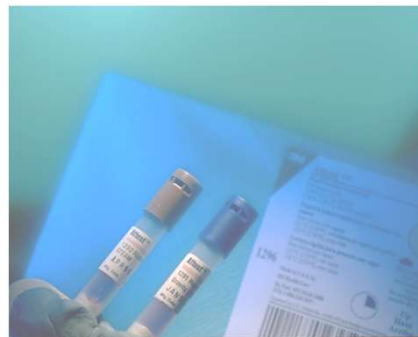

Ficha Técnica

¿Qué es Control de la Carga?

Es monitorización del proceso de esterilización por vapor con una prueba hecha en base a la lectura de un Indicador Biológico en un paquete de prueba.

¿Por qué es necesario?

Porque los procesos de esterilización deben certificarse de acuerdo con las normativas Vigentes. (Minsal 2018 ; AAMI 2017; ISO 11138

Las cargas con implantes deben liberarse para su uso después de la lectura de un control biológico Confirma que el proceso de esterilización ha sido capaz de matar esporas bacterianas.

Control Biológico de Lectura 48 horas Attest:

El Control o Indicador biológico (IB) para ciclos de vapor de 121° gravedad / 132°C con vacío asistido, consiste en un vial o tubo de plástico que contiene una tira de esporas *B. stearothermophilus* vivas ; una ampolla de vidrio sellada con medio de cultivo color púrpura ; tapa codificada de color café, con aberturas para la penetración del esterilizante vapor y filtro hidrofóbico.

El attet o vial posee en su etiqueta externa un indicador químico que vira del rosado al café, cuando es procesado.

Luego de la esterilización, el vial debe ser procesado de acuerdo con el procedimiento que indica el fabricante y que deberá ser protocolizado para realizarse correctamente.

Un vez realizado este procedimiento el vial se incubaba por 48 horas

Un resultado positivo (error en el proceso) es indicado por cambio de color del control a un amarillo intenso que refleja el crecimiento Bacteriano .

Un resultado negativo (proceso de esterilización correcto) es indicado porque el vial conserva las mismas características de color a las 48 horas de incubación . Esta lectura libera la carga para ser usada.

Frecuencia

- Con cada carga de implantes.
- De acuerdo a recomendaciones de normas nacionales e internacionales
- Después de la reparaciones de los equipos.

Codigo	Descripción Producto	Condicion de almacenaje	Tiempo de almacenamiento	Empaque	Codigo Convenio Marco
1262P	Plástico o vial transparente con tapa tubo	15°C a 30°C / 35% a 60% HR	2 Años	10 unids/caja	668306

Uso del producto: El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES