

## FICHA TECNICA PLACA DE OSTOMIA SUR-FIT PLUS® FLEXIBLE

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Placa de Ostomía Flexible. ( sistema dos piezas )
Nombre Comercial	Placa stomahesive Flexible Sur– Fit plus.
Descripción	Placa recortable flexible de ostomía protectora de la piel, con adhesivo microporoso, disco de protección cutáneo stomahesive, con aro de acople para bolsas Sur-Fit Plus.
Marca	ConvaTec
Fabricantes	ConvaTec Inc USA ConvaTec Dominican Republic Inc República Dominicana
Composición del Producto	Placa Protectora de Piel Stomahesive®: Constituida en su parte central por Carboximetil Celulosa Sódica, pectina, gelatina, poli-isobutilenocon soporte adhesivo hipoalergénico.
Características y Acciones del Producto	Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada.  Adhesión seco a Húmedo: La placa protectora de piel Stomahesive ® se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel integra y protegida. Puede permanecer en su sitio hasta por siete días.  Multimedidas: recortable y adaptable a diferentes tamaños de estoma y con acople a bolsas Sur–Fit Plus.
Usos	Utilizable en Ileostomías, Colostomías , Urostomías y cualquier sistema de drenaje que requiera protección de la piel.
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.  Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante  Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave  Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área periostomal  Ampliar el orificio de la placa protectora Stomahesive ® según el tamaño del estoma.  Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad  Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa
Presentaciones	Placa Stomahesive Flexible Aro : 32 mm 38 mm 45 mm 57 mm. Y 70 mm. 5 unidades x caja.

