



Catéter intravenoso cerrado

BD Nexiva™ Diffusics™



Descripción

El catéter de sistema cerrado BD Nexiva™ Diffusics™ está indicado para la inserción en el sistema vascular a corto plazo para toma de muestras de sangre, monitorizar la presión sanguínea o administrar fluidos.

Puede ser usado en cualquier población, teniendo cuenta la adecuación de la anatomía vascular, la idoneidad del procedimiento, los fluidos a infundir y la duración de la terapia. Este dispositivo es compatible para su uso con inyectoras de medio de contraste a una presión máxima de 325psi cuando todos los accesorios no compatibles han sido retirados.

NOMBRE:	BD Nexiva™ Diffusics™
TIPO:	Catéter IV de sistema cerrado
PRESENCIA DE DEHP:	NO
PRESENTACIÓN:	Empaque individual
ALMACENAMIENTO:	Lugar limpio y seco a temperatura ambiente
FABRICACIÓN:	México



Aspectos Técnicos

BD Nexiva™ Diffusics™ lubricado con silicona de grado médico, está compuesto de un catéter fabricado en BD Vialón™ radiopaco con agujeros laterales cercanos a la punta cuyo diseño optimiza los procedimientos de inyección de medio de contraste. También posee una aguja de acero inoxidable, protector de aguja, tabique, plataforma de estabilización, extensión integrada, clamp, conexión luer y tapón. La aguja y catéter están cubiertos por un protector. Una tapa de polipropileno con protector de polietileno de alta densidad está incluida en el empaque.

El sistema cerrado está diseñado para mantener la sangre contenida dentro del dispositivo durante la inserción. Con sistema de bioseguridad pasiva que disminuye el riesgo de accidentes cortopunzantes.

BD Nexiva™ Diffusics™ posee tecnología BD Instaflash™, que permite la visualización inmediata del retorno venoso al realizar la venopunción. El tapón evita la fuga de sangre del tubo de extensión.

Tanto la plataforma de estabilización como la conexión luer, están codificadas por colores para indicar el calibre del catéter.
Dispositivo de uso único. Libre de látex, DEHP, BPA.
No pirogénico.

Método de esterilización EO	Vigencia 3 años
 Libre de Látex	 Certificación



Catálogo Chile

SKU	Descripción de producto	Velocidad de flujo máximo de power inyección	Velocidad de flujo por gravedad
383692	BD Nexiva™ Diffusics™ 22GX 1.00 IN	6.5 ml/seg	45 ml/min
383693	BD Nexiva™ Diffusics™ 20G X 1.00 IN	10 ml/seg	68 ml/min
383694	BD Nexiva™ Diffusics™ 20G X 1.25 IN	10 ml/seg	64 ml/min

