

Filtek™ Universal

Restaurador universal

Descripción

Composite estético universal de nanorelleno. Sistema de resina modernizado que alivia el estrés de contracción y a la vez un sistema simplificado de colores. Presenta opacidad tipo Body, entre esmalte y dentina, que ayuda a una integración más estética con los dientes naturales cercanos, creando un efecto camaleónico. Además, un opacador universal para enmascarar áreas oscuras y un color extra blanco para pacientes con clareamiento dental.



Presentación en jeringa y en cápsula (cápsulas sujetas a disponibilidad geográfica). La boca de la punta de la cápsula permite que el material se extruya como un fluido, después se vuelve más viscoso para darle forma. La punta más prolongada de la cápsula permite una buena adaptación, especialmente en áreas de difícil acceso.

Ventajas

- Selección del color simplificada.
- Opacidad universal para una apariencia más natural.
- Extrablancos (XW) para casos de pacientes con aclaramiento dental.
- Pigmentos fluorescentes que logran restauraciones con un aspecto natural.
- Pink Opaquer (Opacador rosa) para enmascarar fácilmente áreas oscuras.
- Nanotecnología de 3M para una elevada resistencia a la fractura.
- Exclusivos monómeros que ayudan a reducir el estrés de contracción.
- Mayor radiopacidad para facilitar su identificación en el seguimiento.

Indicaciones de uso

- Restauraciones anteriores y posteriores directas (incluidas las superficies oclusales).
- Reconstrucción de muñones.
- Ferulizaciones.
- Restauraciones indirectas, incluidos inlays, onlays y carillas.
- Protocolo de fotopolimerización.

Todos los colores salvo el Pink Opaquer

Tipo de restauración	Profundidad del incremento	Lámparas halógenas (con una potencia de 550-1000Mw/cm²)	Lámparas LED (con una potencia de 1000-2000Mw/cm²)
Todas	2 mm	20 sec oclusal	10 sec oclusal

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecue der 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay

Opacador: Pink Opaquer

Tipo de restauración	Profundidad del incremento	Lámparas halógenas (con una potencia de 550-1000Mw/cm²)	Lámparas LED (con una potencia de 1000-2000Mw/cm²)
PO	1 mm	40 sec oclusal	20 sec oclusal

Presentación

Jeringas: Jeringa de 4 g colores disponibles Body: A1, A2, A3, A3.5, B2, Extrablanco (XW) y Opacador y Pink Opaquer (PO).

Cápsulas: Caja de 20 cápsulas de 0,2 g cada una. Disponibles en tonos Body: A1, A2, A3, A3.5, B2 Extrablanco (XW) y Opacador y Pink Opaquer (PO). Las cápsulas deben utilizarse con el dispensador de cápsulas 5850RD (SKU: 7020140771-8). Cápsulas sujetas a disponibilidad geográfica.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecue der 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay