

Filtek™ One Bulk Fill

Restaurador en bloque con estética

Descripción

Filtek™ One Bulk Fill, resina de colocación en bloque diseñado para restauraciones anteriores y posteriores, sus propiedades ópticas únicas y su opacidad mejorada le brindan la simplicidad de la colocación en un solo paso —hasta 5 mm— sin comprometer los resultados estéticos.



Ventajas

- Colocación rápida y fácil en un solo paso.
- Mayor opacidad para una estética mejorada.
- Disminución del estrés para permitir un fotocurado de hasta 5 mm de profundidad.
- Excelente adaptación.
- Sin necesidad de capas adicionales o costosos dispositivos de dispensado.
- Con la verdadera nanotecnología de 3M brinda una resistencia al desgaste superior y excelente retención del pulido.
- Alta radiopacidad.

Indicaciones de uso

- Restauraciones posteriores directas (incluyendo superficies oclusales)
- Reconstrucción de muñones
- Ferulización
- Restauraciones indirectas incluyendo inlays, onlays

Tipo de restauración	Profundidad del incremento	Lámparas halógenas (con una potencia de 550-1000Mw/cm²)	Lámparas LED (con una potencia de 1000-2000Mw/cm²)
		20 sec oclusal	10 sec oclusal
Clase II	5 mm	20 sec bucal	10 sec bucal
		20 sec lingual	10 sec lingual

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecue der 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay

Tipo de restauración	Profundidad del incremento	Lámparas halógenas (con una potencia de 550-1000Mw/cm²)	Lámparas LED (con una potencia de 1000-2000Mw/cm²)
Clase I	4 mm	40 sec oclusal	20 sec oclusal

Tipo de restauración	Profundidad del incremento	Lámparas halógenas (con una potencia de 550-1000Mw/cm²)	Lámparas LED (con una potencia de 1000-2000Mw/cm²)
Reconstrucción de muñones	5 mm	20 sec oclusal	10 sec oclusal
		20 sec bucal	10 sec bucal
		20 sec lingual	10 sec lingual

Presentación

Jeringas: Jeringa de 4 g tonos disponibles A1, A2 y A3.

Cápsulas: Caja de 20 cápsulas de 0,2 g cada una. Disponibles en tonos A1, A2 y A3. Las cápsulas deben utilizarse con el dispensador de cápsulas 5850RD (sku: 7020140771-8).

Kit: “Essential Kit” incluye 2 jeringas Filtek® One de 4 g tono A2 + 1 jeringa Filtek® One de 4 g tono A3 + 1 jeringa gel ácido grabador Scotchbond™ de 3 ml. con puntas de aplicación + 1 adhesivo Single Bond Universal de 3 ml. + 3 espirales Sof-Lex™ de pre-pulido + 3 espirales Sof-Lex™ Diamond para pulido final + accesorios de aplicación.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecue der 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay