

Kit Ketac Molar Easymix

Ionómero de vidrio

Descripción

Es un ionómero de vidrio de alta viscosidad, libre de metal, especialmente desarrollado para restauraciones definitivas en dientes deciduos, así como en molares y premolares permanentes.



Ventajas

- Excelente adhesión a esmalte y dentina.
- Alta resistencia a la compresión y flexión. Previene la fractura del material.
- La adhesión inherente a la estructura dental puede ser aumentada aplicando el líquido acondicionando la dentina
- Gran resistencia al desgaste. Baja erosión a los ácidos, mantiene una excelente integridad marginal.
- Radiopaco.
- Su polvo granulado facilita la mezcla y su dosificación prácticamente sin burbujas y minimiza el desperdicio de material.

Indicaciones de uso

Terapia de obturación convencional:

- Como base para restauraciones de resina compuesta de una o de varias superficies.
- Reconstrucción de muñones.
- Obturaciones en dientes temporales.
- Obturaciones de una sola superficie en áreas que no involucran la oclusión.
- Obturación de cavidades Clase V donde la estética no es primordial.
- Obturaciones semipermanentes de una o de varias superficies.

Terapia Mínimamente invasiva y Técnica Restaurativa Atraumática (A.R.T)

- Obturaciones en dientes temporales.
- Obturaciones de una sola superficie en áreas que no involucran la oclusión.
- Obturación de cavidades Clase V donde la estética no es primordial.
- Obturaciones semipermanentes de una o de varias superficies.
- Obturaciones semipermanentes de cavidades Clase III.
- Sellado de fisuras.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay

Instrucciones de uso

Antes de dispensar, agitar el frasco para que el polvo se disperse. Dispensar en proporción 1 gota de polvo con 1 gota de líquido.
Tiempo de fraguado total, desde el inicio de la mezcla: 4.30 minutos.

Presentación

Kit tono A3 Polvo 12,5 g Líquido 8,5 ml Block de mezcla Instructivos

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay