

Vitrebond Plus

Ionómero de vidrio de base o liner



Descripción

Vitrebond Plus es una base cavitaria/ liner de Ionómero de Vidrio modificado con resina, foto polimerizable y en presentación clicker, dispensado más rápido y sencillo, con la mezcla correcta en todo momento.

Vitrebond Plus como base cavitaria protege contra la sensibilidad post operatoria, ofrece un alivio a las tensiones, actúa como barrera térmica, sella la dentina, previene las microfiltraciones.

Ventajas


- Gran adhesión a la dentina, sellando el diente para protegerlo frente a la micro filtración, contribuyendo con esto a reducir el potencial de sensibilidad post operatoria
- Liberación de flúor de un verdadero ionómero de vidrio, re mineralización del fondo de la cavidad
- Dispensado de cantidades preestablecidas, pasta: líquido, gracias a su presentación clicker para obtener siempre resultados predecibles
- Menor tiempo de polimerización
- Baja viscosidad hace más fácil su colocación especialmente en cavidades profundas
- Barrera termal frente a las variaciones de temperatura
- La colocación previa de Vitrebond Plus al grabado ácido protege los túbulos dentinario
- Claramente observable en términos de color

Indicaciones de Uso

Base/Liner bajo restauraciones de

- Composite
- Amalgamas
- Cerámicas
- Metal

Instrucciones de Uso

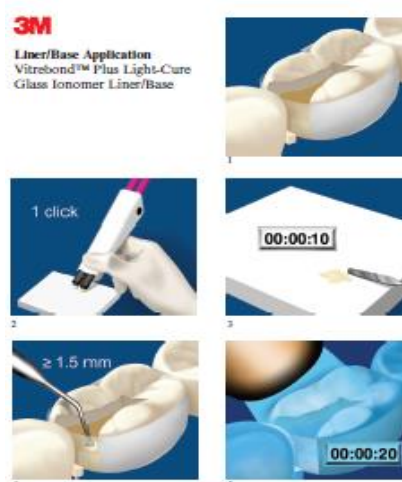

Aplicar primero 1/2mm o menos, cubriendo dentina
Foto polimerizar por 20 seg.
Pudiendo aplicar una segunda capa hasta llegar máximo a los 1,5 mm y fotocurar.

Presentación

Vitrebond Plus, kit de introducción incluye:

- 1 dispensador Clicker 10 g.
- 1 bloque de mezcla grande
- Instrucciones
- Guía de uso.

Actualización Nov 2017