

Single Bond Universal

Descripción

Single Bond Universal es un adhesivo fotopolimerizable de un componente, disponible en botella para la dosificación múltiple. El adhesivo se utiliza dependiendo de la indicación: - en el procedimiento “Self-Etch” (autograbado), para lograr un tiempo de tratamiento lo más corto posible y minimizar las sensibilidades postoperatorias. - con grabado selectivo del esmalte, para maximizar la adherencia al esmalte dental y minimizar las sensibilidades postoperatorias. - en el procedimiento “Total-Etch” (grabado total) con un paso previo de grabado con ácido fosfórico. También sirve para cementar restauraciones indirectas en conjunto con RelyX™ Ultimate de 3M.



Ventajas

- Capacidad de ser utilizado en cualquiera de las técnicas adhesivas, grabado total, grabado selectivo de esmalte o auto grabado.
- Alta tolerancia a la humedad para permitir la unión constante a dentina grabada húmeda y seca, gracias a la presencia de Copolímero de Vitrebond.
- Virtualmente no hay sensibilidad postoperatoria.
- Actúa como acondicionador/adhesivo con capacidad para adherirse a sustratos indirectos (metales, óxido de zirconio, alúmina y cerámicas de vidrio) gracias a la presencia en su composición de MDP y Silano.
- Nuevo formato tapa Flip Cap, de fácil apertura y cierre.

Indicaciones de uso

Recomendaciones de uso bajo el composite: Independiente si usted utiliza técnica de grabado total, de grabado selectivo de esmalte o técnica de autograbado; la técnica de colocación bajo el composite es la siguiente:

- Aplicar el adhesivo con el aplicador desechable cubriendo la superficie sustancia del diente y friccionar durante 20 segundos.
- Seguidamente soplar el líquido durante aprox. 5 segundos con aire suavemente, hasta que ya no se mueva y el disolvente se haya evaporado por completo.
- Polimerizar el adhesivo durante 10 segundos con una lámpara de fotocurado.

Presentación

Single Bond Universal disponible en frasco de 5 ml y de 3ml.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay