

Sistema de discos Sof-Lex™

Sistema de discos de terminado y pulido

Descripción

Los discos de terminado y pulido Sof-Lex™ son fáciles de usar, y están considerados como los líderes en la industria en producir resinas de alto lustre. Se encuentran codificados por color lo que hace escoger la secuencia del grano apropiado de manera lógica y conveniente. Los discos poseen un ojo metálico redondo que simplemente se inserta sobre el mandril. Cambiar los discos es fácil y rápido porque no hay necesidad de alinearlos. La remoción del disco se logra con el toque de un dedo. Cada disco es reversible, lo que lo hace muy versátil para varias superficies del diente.



Ventajas

- Discos Reversibles: Permite la alineación más sencilla de los discos para el pulido de varias superficies.
- Cambio de discos rápido y sencillo: Ajuste sencillo y seguro para poner y quitar del mandril sin necesidad de alinear.
- Código de colores secuencial; de más oscuro (grueso) a claro (superfino) para un proceso paso a paso sencillo de seguir.
- Dos tamaños: Dependiendo de la necesidad 13 mm o 9 mm de diámetro.
- Mayor superficie abrasiva.
- Elección entre flexibilidad y grosor del disco. Puede ser usado en la mayoría de las aplicaciones escogiendo entre regular y extrafino (XT).

Instrucciones de uso



3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay



	Grueso	Mediano	Fino	Super fino
Color	Café (XT)/Negro	Naranja (XT)/Azul Fuerte	Amarillo oscuro (XT)/Azul	Amarillo claro (XT)/Azul claro
Función	Reducción/volumen	Contorneado	Terminación	Brillo
Velocidad	10,000 rpm	10,000 rpm	30,000 rpm	30,000 rpm
Tiempo	El necesario	15 a 20 segundos	15 a 20 segundos	15 a 20 segundos
Aplicación	Superficie vestibular, lingual, oclusal e incisal.			

Presentación

Repuestos individuales:

Bolsas con 30 discos Sof-Lex™ XT (extra delgado) cada una. Diámetro 3/8" o 1/2".

- 4930C Discos Sof-Lex XT 3/8" Grueso, 30/bolsa
- 4931C Discos Sof-Lex XT 1/2" Grueso, 30/bolsa
- 4930M Discos Sof-Lex XT 3/8" Mediano, 30/bolsa
- 4931M Discos Sof-Lex XT 1/2" Mediano, 30/bolsa
- 4930F Discos Sof-Lex XT 3/8" Fino, 30/bolsa
- 4931F Discos Sof-Lex XT 1/2" Fino, 30/bolsa
- 4930SF Discos Sof-Lex XT 3/8" Super Fino, 30/bolsa
- 4931SF Discos Sof-Lex XT 1/2" Super Fino, 30/bolsa

Bolsas con 30 discos Sof-Lex™ cada una. Diámetro 3/8" o 1/2".

- 4850C Discos Sof-Lex 3/8" Grueso, 30/bolsa
- 4851C Discos Sof-Lex 1/2" Grueso, 30/bolsa
- 4850M Discos Sof-Lex 3/8" Mediano, 30/bolsa
- 4851M Discos Sof-Lex 1/2" Mediano, 30/bolsa
- 4850F Discos Sof-Lex 3/8" Fino, 30/bolsa
- 4851F Discos Sof-Lex 1/2" Fino, 30/bolsa
- 4850SF Discos Sof-Lex 3/8" Super Fino, 30/bolsa
- 4851SF Discos Sof-Lex 1/2" Super Fino, 30/bolsa

Kit: "Essential Kit" incluye 30 discos Sof-Lex™ XT de 1/2" – Grueso, 30 discos Sof-Lex™ XT de 1/2" – Mediano, 30 discos Sof-Lex™ de 1/2" – Fino, 30 discos Sof-Lex™ de 1/2" - Super fino, 1 mandril de sistema Pop-On™ de fácil intercambio, 3 espirales Sof-Lex™ de pre-pulido, 3 espirales Sof-Lex™ Diamond para pulido final.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay