

3M™Clinpro™ White Varnish

Julio 18 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

3M™Clinpro™ White Varnish, es un barniz que contiene fluoruro para aplicación en esmalte y dentina en el tratamiento de los dientes con hipersensibilidad. El barniz blanco Clinpro se activa con la humedad y la saliva. Se esparcirá y adherirá a los dientes húmedos. El barniz blanco Clinpro es una solución de resinas modificadas en base de alcohol. El producto se ha endulzado con Xilitol.

- El barniz blanco Clinpro contiene un innovador fosfato tricálcico (TCP) ingrediente exclusivo de 3M ESPE. Los iones de calcio y fosfato son componentes que se dan de forma natural en la saliva y están asociados desde hace tiempo con el mantenimiento saludable de los dientes.
- El sabor a menta se suministra en envases monodosis que contienen 0.50 mg de barniz blanco Clinpro. Cada 0,50 ml de Barniz blanco Clinpro contiene 25 mg de fluoruro de sodio equivalente a 11.3 mg de ion de flúor. Contiene 22.600 partes por millón de flúor en un sistema solvente único.
- Está disponible en sabor de menta y guinda. Migra a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar. Se adhiere a los dientes a los cuáles se ha aplicado. Libera flúor, calcio y fosforo.

INDICACIONES

- Para utilizar como capa con contenido en fluoruro que:
- Trata la hipersensibilidad de los dientes
- Trata la dentina expuesta y la sensibilidad de la superficie de la raíz

PRESENTACIONES

Cod Munnich	Producto	Descripción
527847	CLINPRO WHITE VARNISH 100 UNIDADES SABOR GUINDA	BARNIZ DE FLUOR, FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP SABOR GUINDA- CLINPRO WHITE VARNISH SABOR GUINDA- CAJA 100 SACHET Y 100 PINCEL- 3M SOLVENTUM - VIGENCIA 18 MESES
527846	CLINPRO WHITE VARNISH 100 UNIDADES SABOR MENTA	BARNIZ DE FLUOR, FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP SABOR MENTA - CAJA 100 SACHET Y 100 PINCEL- 3M SOLVENTUM
527845	CLINPRO WHITE VARNISH 50 UNIDADES SABOR MENTA	BARNIZ DE FLUOR, FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP SABOR MENTA- CAJA 50 SACHET - 3M SOLVENTUM
527848	CLINPRO WHITE VARNISH 100 UNIDADES SABOR MELON	BARNIZ DE FLUOR, FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TCP SABOR MELON- CAJA 100 SACHET Y 100 PINCEL- 3M SOLVENTUM

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

1. La superficie del diente(s) a ser tratada debe ser mínimamente limpiada con un “cepillo de dientes”. No se requiere un tratamiento profiláctico.

2. Dispense el contenido completo en la guía de aplicación redonda de la parte posterior de la bolsa de papel de aluminio o en uno de los adhesivos de guía de aplicación que se proporcionan en la caja.

3. IMPORTANTE: Use el pincel aplicador para mezclar bien el barniz blanco Clinpro ya que los componentes de todos los barnices de fluoruro de sodio pueden separarse durante el almacenamiento. Mientras mezcla, mantenga el material distribuido uniformemente dentro del círculo interno de la guía de aplicación.

4. Puede que sean suficientes una o dos cargas de cepillo de barniz blanco Clinpro para un cuadrante completo cuando se utiliza para una aplicación de rutina en visitas de revisión. Para tratamientos más extensos, consulte las cantidades máximas sugeridas en las recomendaciones de aplicación que se encuentran más adelante.

5. Utilice la guía de aplicación aplicando el material dentro de la mitad superior del círculo hacia abajo hasta la línea que indica la cantidad máxima.

Directrices para aplicaciones máximas:

Dosis de 0,25 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,25 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición primaria.

* Para usar en el tratamiento de pacientes que requieran un cobertura de superficie dental limitada.

Dosis de 0,40 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,40 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición mixta que requieran una cobertura de superficie dental extensa.

NO use esta cantidad para tratar pacientes con dentición primaria únicamente. Siga las directrices mostradas a continuación.

Dosis de 0,50 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,50 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición permanente que requieran una cobertura de superficie dental extensa.

NO use esta cantidad para tratar pacientes con dentición primaria únicamente. Siga las directrices mostradas a continuación.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Este producto ha sido diseñado para almacenarse y usarse a temperatura ambiente. La vida útil a temperatura ambiente es de 24 meses. Una temperatura ambiente continuamente superior a 27°C/80°F, o inferior a 10°C/50°F puede reducir la vida útil. Consulte la fecha de vencimiento en el envase externo.