

3M™ Concise™ Light Cured White Sealant

8 Agosto 2025



Ficha Técnica

Descripción:

Concise Light Cured White Sealant es un sistema utilizado para sellar fosetas y fisuras localizados en la estructura dental, las cuales son áreas de alto riesgo para el desarrollo de lesiones cariosas.

INFORMACIÓN GENERAL

El sellador blanco de fotocurado de 3M™ ESPE™ Concise™ es un sellador de fosas y fisuras diseñado para fotocurado. Cuando se aplica sobre la superficie de los dientes, el Sellador blanco de fotocurado Concise es un fluido opaco y viscoso, de color amarillo muy pálido. Al aplicarlo, el sellador forma una película opaca y dura de color amarillo pálido con una inhibición leve de la superficie.

- Cumple con la norma ISO 6874 (resina dental basada en sellador de fovea y fisura)
- Composición de resina BIS-GMA/TEGDMA
- Sin relleno
- La luz de curado debe tener una intensidad mínima de 400 mW/cm²
- Usar a temperatura ambiente

Usos y aplicaciones

- Fosas y fisuras profundas de molares y premolares completamente libres de caries
- Fosas de caras palatinas de incisivos permanentes.
- Molares temporales que presentan fosas y fisuras profundas y sin caries.

Uso y Almacenamiento

- ☐ Reemplace la tapa de las jeringas y botellas inmediatamente después del uso.
- ☐ No exponga estos materiales a temperaturas elevadas.

Lámpara Halogenas (con una potencia de 550-1,000 mW/cm²)	Lámpara LED (con una potencia de 1,000-2,000 mW/cm2)
20 Seg . Oclusal	10 seg oclusal

Uso y Almacenamiento

- ☐ Reemplace la tapa de las jeringas y botellas inmediatamente después del uso.
- ☐ No exponga estos materiales a temperaturas elevadas.
- ☐ No almacene estos materiales cerca de productos que contienen eugenol.
- ☐ El grabador y el sellador están diseñados para ser usados a temperatura ambiente de aproximadamente 21°-24°C ó 70°-75°F
- ☐ El tiempo de vida de almacenamiento es de 24 meses.

Presentaciones:

Cod Munnich	Producto	Presentación
527851	SELLANTE FOTOCURADO 3M CONCISE SIN ÁCIDO GRABADOR	KIT: FRASCO 6 ML SELLANTE, 1 PORTA PINCEL, 60 PUNTAS PINCELES
527850	SELLANTE FOTOCURADO 3M CONCISE CON ACIDO GRABADOR	KIT FRASCO 6 ML SELLANTE, 1 PORTA PINCEL, 9 ML ACIDO ORTOFOSFORICO- 60 PUNTAS DE PINCELES -ACCESORIOS