

Soluciones Dentales

3M™ VPS Tray Adhesive

Adhesivo de cubeta para VPS

8 Agosto 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El adhesivo de vinilpolisiloxano para cubetas VPS Tray Adhesive, fabricado por 3M, ofrece una firme adhesión entre la cubeta de impresión y los materiales de impresión de silicona de adición de 3M.

El Adhesivo VPS para Silicona Express 3M de alta performance diseñado específicamente para mejorar la fijación entre el material de impresión Vinyl Polysiloxano (VPS) y la cubeta de impresión.

Indicaciones:

Cubetas de impresión de metal, metacrilato o polipropileno.

Materiales de impresión de vinilpolisiloxano (no apto para materiales de impresión de poliéteres)

Instrucciones generales de aplicación:

Limpiar la cubeta de impresión después de haberla probado en la boca del paciente, para evitar una contaminación del pincel del adhesivo. Aplicar una capa fina de adhesivo con el pincel sobre la cubeta. Dejar secar por completo, 5-15 minutos idealmente.

Presentaciones

Cod Munnich	Producto	Presentación
527852	3M EXPRESS ADHESIVO VPS PARA SILICONA ADICION	FRASCO 17 ML

Almacenamiento y conservación

Almacenar el producto a 15-25°C.

No utilizarlo después de haber transcurrido la fecha de caducidad