

Soluciones Dentales

3M™ Ketac™ Cem Easymix

7 Agosto 2025



Ficha Técnica

Descripción:

diseñado por granulación del polvo, Ketac Cem Easy Mix Cemento de Ionómero de Vidrio puro, indicado para cementaciones convencionales definitivas. De mezcla manual, se fabrica con base de Flúor Aluminio Silicato Tiene formulación de polvo granulado lo que ayuda a mejora la mezcla, ahorrar tiempo de preparacion, la humectación y reducir el desperdicio de polvo durante la mezcla. Polvo con propiedades mejoradas de fluidez, que produce una mejor y reproducible dosificación, obteniendo resultados clínicos consistentes. Líquido para humectar el polvo que ofrece un proceso de mezcla más fácil y rápida, reduciendo la probabilidad de desperdicio del producto. Menor generación de polvo durante la apertura y dosificación del producto. Posee un grosor de película extremadamente fino que optimiza la adaptación y la integridad marginal.

Uso clínico / Indicaciones:

- Cementación . inlays y onlays, coronas y puentes, pines y postes. metal-cerámica o de metal-resina, siempre que resulten adecuados para la cementación convencional
- Cementado de coronas y puentes metálicos, metal-cerámicos o de metal- resina, siempre que resulten adecuados para la cementación convencional sobre pilares de implante
- Cementado de pins y postes metálicos o cerámicos de alta resistencia, siempre que resulten adecuados para la cementación convencional
- Liner debajo de restauraciones de resina o amalgama.
- Bandas ortodónticas en el ámbito de tratamientos protéticos u ortodónticos.

Instrucciones generales de aplicación:

Preparación:

Seleccione los dientes. Los dientes deben estar lo suficientemente erupcionados para poder mantener un campo seco.

Limpieza del esmalte. Limpie profusamente el esmalte para remover placa de las superficies del

esmalte y fisuras. Enjuague profusamente con agua. Nota: No utilizar ningún medio de limpieza que contenga aceite.

Aísle los dientes y seque. Mientras que el dique de goma provee del mejor aislamiento, los rollos de

algodones usados en conjunto con barreras de aislamiento, son también aceptables.

Presentación:

Cod Munnich	Producto	Presentación
527865	KETAC CEM EASYMIX KIT 30GR	KIT FRASCO 30 G POLVO / 12 ML LIQUIDO Y ACCESORIOS

Instrucciones generales de aplicación:

Preparación:

La proporción estándar para cementaciones convencionales es de 3,8 porciones de polvo (aprox. 1 cuchara rasa) : 1 porción de líquido (2 gotas).

Mezcla min:seg	Tiempo de trabajo (incluido el mezclado) Min:seg	Fraguado (a partir del inicio de mezclado)
0:30 seg	3:10	7:00min.

Almacenamiento y vida útil

Proteger el polvo contra la humedad. Cerrar bien la botella de polvo después del uso. Almacenar el producto a 15-25 °C/59-77 °F.

No debe emplearse después de ser transcurrida la fecha de caducidad.

Vida útil del producto:

El producto tiene un tiempo de 27 meses de vida útil a partir de la fecha de fabricación.