

# Soluciones Dentales

# 3M™ Express™ STD

## Material de impresion por adición VPS

8 Agosto 2025



## FICHA TÉCNICA

### Descripción:

El material de impresión 3M™ Express™ STD es un material de impresión VPS diseñado para ayudarle a crear impresiones precisas de coronas, puentes y dentaduras utilizando técnicas de masilla (pesado)/ligero de 1 o 2 pasos. Este material de impresión dental proporciona una reproducción precisa de los detalles. Este sistema cuenta con una presentación de mezcla manual y auto mezcla en cartuchos fáciles de usar.

Sistema de Impresión a base a vinil polisiloxano. Consta de material pesado Express STD Putty que en combinación con 2 materiales liviano (azul o verde) se utilizan para técnica de un paso o dos tiempos operatorios. Material con un alto definición de detalle y gran estabilidad, pudiendo realizar uno o más vaciados hasta 14 días después de tomada la impresión. Buena estabilidad dimensional. Excelente recuperación elástica. Sin sabor, ni olor. Tixotrópico. Excelente resistencia al desgarre. Capacidad de vaciado múltiple.

El sistema cuenta con un Adhesivo VPS para Silicona Express 3M de alta performance diseñado específicamente para mejorar la fijación entre el material de impresión Vinyl Polysiloxano (VPS) y la cubeta de impresión. Su fórmula avanzada garantiza una adhesión segura y estable, incluso en condiciones clínicas exigentes, permitiendo impresiones precisas y sin desplazamientos.

## Indicaciones:

Impresiones para puentes y coronas

Impresiones para inlays / onlays

Impresiones parciales y dentaduras postizas

## Instrucciones generales de aplicación:

| Producto                | Viscosidad | Color   | Tpo Fraguado intraoral |
|-------------------------|------------|---------|------------------------|
| 3M Express Putty        | Masilla    | Naranja | 5 min                  |
| 3M Express Liviana 7302 | Liviana    | Verde   | 5 min                  |
| 3M Express Liviana 7301 | Liviana    | Azul    | 3 min 30 seg           |

## Presentaciones

| Cod Munnich | Producto                                                             | Presentación                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527868      | 3M EXPRESS Material de impresión liviano<br>Azul REF.7301            | KIT 2 CARTUCHOS DE 50 ML C/U Y 10<br>PUNTAS MEZCLADORAS AMARILLA                               |
| 527852      | 3M EXPRESS ADHESIVO VPS PARA SILICONA<br>ADICION                     | FRASCO 17 ML                                                                                   |
| 527869      | 3M EXPRESS Material de impresión liviano<br>VERDE (REGULAR) Ref:7302 | KIT 2 CARTUCHOS DE 50 ML C/U Y 10<br>PUNTAS MEZCLADORAS AMARILLA                               |
| 527866      | 3M EXPRESS Putty Material de impresión con<br>cuchara                | Kit: 1 POTE 305 ML PASTA BASE/ 1 POTE<br>305 ML PASTA CATALIZADORA y CUCHARAS<br>DISPENSADORAS |