

Soluciones Dentales

3M™ Transbond™ XT Light Cure Adhesive

Adhesivo para bracket de fotocurado

11 Agosto 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El Adhesivo de Fotocurado 3M™ Transbond™ XT, es un adhesivo fotopolimerizable de uso ortodóntico, indicado para la adhesión de brackets metálicos y cerámicos. El Adhesivo de Fotocurado 3M™ Transbond™ XT, es un reconocido adhesivo ortodóntico frecuentemente utilizado como estándar de oro en estudios científicos de adhesión. Sus propiedades de manipulación le permiten ser dispensado con precisión y sin desperdicio en las bases de los brackets, una vez presentado en el diente, la limpieza de excedentes en los bordes de la base es sencilla y no hay cambios indeseados en la orientación del bracket antes de la fotopolimerización. El Adhesivo para Fotocurado 3M™ Transbond™ XT es compatible con Transbond™ XT Primer, 3M™ Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer y 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer.

- Indicado para la adhesión de brackets metálicos y cerámicos
- Alta fuerza adhesiva
- Fácil limpieza de excedentes alrededor de la base de los brackets
- Adecuado para la confección de attachments para alineadores
- Menos caídas.
- Mejora la productividad en tiempo del ortodoncista (tiempo de consulta).

Indicaciones:

- Este producto está diseñado para el cementado directo de brackets ortodónticos cerámicos y metálicos.
- Las capsulas rellenas de adhesivo y la pistola dispensadora tambien facilitan la aplicación.

Almacenamiento y uso

1. No exponga los materiales a temperaturas elevadas o luz intensa. Espere a que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
 2. No guarde el material en las cercanías de productos que contengan eugenol, ya que esto puede provocar un tratamiento inadecuado del adhesivo.
 3. Este sistema está diseñado para utilizarlo a temperatura ambiente (20-25 °C, 68-77° F). Guárdelo entre 2-27 °C, 35-80 °F 4.
- La vida útil a temperatura ambiente es la de la fecha de caducidad de la caja del kit.
5. Sensible a la luz. No exponga el adhesivo Transbond XT sin tratamiento a luz ambiente durante periodos de tiempo prolongados. Mientras no las esté utilizando, guarde las jeringas con sus tapones a temperatura ambiente.

Presentación

Cod Munnich	Producto	Presentación
527872	Kit Transbond XT en jeringas Ref. 712-035	Kit: 2 jeringas de 4 gr.c/u -1 Primer 6 ml- 60 pinceles- 1 Portapincel
576572	KIT TRANSBOND XT EN JERINGAS REF:712-036	BOLSA 4 jeringas de 4 gr c/u