

3M™ Adaptic Digit™

Apósito para Dedo No Adherente

¿Qué es?

3M™ Adaptic Digit™ Apósito para Dedo No Adherente, es un apósito específicamente diseñado para ser usado en dedos y orтеjos. Está fabricado con una malla de acetato de celulosa recubierta de una silicona especial, con una ligera capacidad adhesiva sobre piel sana y una malla tubular doble de algodón.

¿Qué hace?

- El apósito no se adhiere a la herida, es adaptable y flexible, lo que proporciona la máxima movilidad al dedo.
- Es rápido y fácil de aplicar y se puede retirar de la herida de forma limpia y sin causar daño tisular.
- No se requiere el uso de tijeras para su aplicación ni retiro.
- Se puede usar como apósito primario o secundario.

¿Cuándo se utiliza?

El apósito 3M™ Adaptic Digit™ está indicado para el tratamiento de heridas leves a graves de dedos de manos y pies, tales como:

- Laceraciones y abrasiones.
- Lesiones traumáticas.
- Extracciones de uñas.
- Líneas de sutura.

Instrucciones de uso

Preparación de la zona 1:

1. Prepare la herida de acuerdo con su protocolo de tratamiento habitual.
2. Asegúrese de que la piel perilesional esté seca.

Aplicación del apósito 1:

1. Quite la tira plástica brillante del dorso.
2. Coloque la tira sobre la punta del dedo y extienda suavemente cubriéndolo.
3. Desenrolle hacia abajo el anillo inferior de vendaje tubular sobre la malla no adherente (y apósito secundario si lo hubiera) y continúe desenrollando la anilla superior para formar una doble capa de protección.

Contraindicaciones

Sensibilidad a alguno de sus componentes.



Embalaje

Embalaje de la unidad estéril:

- Denominación del artículo.
- Método de esterilización utilizado.
- Fecha de caducidad.
- Número de lote.

Método de esterilización:

Esterilizado por radiación.

Hablemos:

Para obtener más información sobre las ventajas de la matriz 3M™ Promogran Prisma™ póngase en contacto con su representante de 3M™.

Conservación:

Entre 0 °C y 40 °C.

Código	Medidas	Presentación	Embalaje externo
MAD003	Pequeño (2 cm).	Caja de 10 uds.	1 caja (170 uds).
MAD013	Medio (2.4 cm).	Caja de 10 uds.	1 caja (170 uds).
MAD023	Grande (2.8 cm).	Caja de 10 uds.	1 caja (170 uds).
MAD042	Extra grande (3 cm).	Caja de 10 uds.	1 caja (170 uds).
MAD062	Dedo del pie (2.8 cm).	Caja de 10 uds.	1 caja (170 uds).



3M Cono Sur
División de Soluciones Médicas

3M Chile

Santa Isabel 1001
7501412, Providencia, Santiago
Tel: 600 300 3636
go.3m.com/3msalud-chile

Systagenix

Parte de 3M