

Adaptic Touch™

Apósito No Adherente de Silicona



Descripción

3M™ Adaptic Touch™ Apósito No Adherente de Silicona es un apósito primario de malla abierta compuesto por acetato de celulosa revestido con una capa de silicona de suave adherencia, que permite que pueda permanecer en el lugar de aplicación, facilitando a su vez su retiro atraumático de la herida y de la piel perilesional.

Suave adhesivo de silicona que facilita la aplicación del apósito y permite una retirada atraumática y sin dolor. Malla especialmente diseñada para reducir el riesgo de acumulación de exudado y la adherencia de la herida al apósito secundario

Indicaciones de uso

3M™ Adaptic Touch™ Apósito No Adherente de Silicona está indicado en el tratamiento de heridas crónicas superficiales o profundas, con exudado de bajo a elevado como:

- Úlceras de etiología venosa.
- Lesiones por presión.
- Úlceras en pie diabético.
- Heridas traumáticas y quirúrgicas.
- Zonas donadores de injertos.
- Quemaduras de primer y segundo grado.
- Su uso también es adecuado, bajo supervisión médica, con la terapia de presión negativa (TPN)¹.

Selección del apósito

Seleccione un tamaño de 3M™ Adaptic Touch™ mayor que la herida, para asegurar que el apósito pueda ser aplicado sobre piel intacta, alrededor de los bordes de la herida.

3M™ Adaptic Touch™ puede ser cómodamente cortado, sin deshilacharse para una mejor adaptación a la morfología de la lesión.

Si requiere más de un apósito 3M™ Adaptic Touch™, asegúrese de que los apósitos se superpongan, con el fin de evitar la adherencia del apósito secundario a la herida; no obstante, la superposición se deberá reducir al mínimo para prevenir la oclusión de los orificios.

Aplicación del apósito

- Prepare y limpie cuidadosamente la herida siguiendo su protocolo estandarizado.
- Asegúrese que la piel perilesional esté seca.
- Retire las películas protectoras del apósito.
- Coloque el apósito 3M™ Adaptic Touch™ directamente sobre la lesión, fijándolo con su suave adhesivo de silicona a la piel perilesional.
- Aplique el apósito secundario no oclusivo o semioclusivo.

Cambio del apósito

3M™ Adaptic Touch™ puede permanecer en la herida durante varios días, en función del estado de la misma y de la cantidad de exudado.

Método de esterilización:

Radiación Gamma.

Garantía de calidad:

Marcado CE 0086.

Envasado:

Envase unitario estéril. Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo.
- Método de esterilización utilizado.
- Fecha de caducidad.
- Número de lote.

Conservación:

Entre 0 °C y 30 °C

Aviso importante:

es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor, recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

Presentación:

Código	Nombre del producto	Presentación
TCH501	Adaptic Touch	Caja de 10 uds.
TCH502	Adaptic Touch	Caja de 10 uds.
TCH503	Adaptic Touch	Caja de 10 uds.
TCH504	Adaptic Touch	Caja de 5 uds.

Aviso importante:

es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor, recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.