

Set de Administración de Macrogoteo



Descripción

Set de administración de soluciones de macrogoteo (20 gotas/ml) SMARTMED.

Características

- Producto desechable, de un solo uso.
- Longitud total 1,75 m (aprox).
- Con filtro para líquidos de 15 micrones.
- Posee sitio de inyección con aletas antipinchazos accidentales.
- Con filtro (venteo) para aire que permite usarse con envases rígidos.
- Posee cono de conexión luer lock rotatorio.
- No toxico, No pirogénico.
- Libre de látex.

Indicaciones de uso

- Dispositivo médico destinado a la administración de soluciones vía intravenosa.

Modo de uso

1. Cierre el clamp.
2. Retire el protector de la espiga de punción que va al matraz de suero.
3. Conecte la espiga al matraz de suero.
4. Cuelgue el matraz de suero a una altura de 1,2 mts. del paciente.
5. Llene la cámara de goteo hasta la mitad, presionándola con los dedos. (Cuide de no llenar toda la cámara de goteo).
6. Retire el protector del Luer lock y suelte el Roller clamp, deje que la solución fluya para sacar burbujas de aire de la bajada.
7. Cierre el clamp firmemente y conecte.
8. Regule el clamp y observe las condiciones de goteo.

Composición específica

Fabricada de PVC flexible, translucido. (Materiales atóxicos, según procedimiento descrito en la U.S.P.XXXVIII).

Producto esterilizado en óxido etileno.

Precaución

La esterilidad no está garantizada si el empaque está dañado.

Almacenaje

- Lugar limpio y seco.
- Temperatura menor a 25°C.

Caducidad

5 años.

Presentación:

Bolsa x 25 unidades.

Marca

SMARTMED.

Fabricación:

China.

Distribuido por:

Comercial LBF Limitada.



Código LBF	Descripción	Unidad de venta
082-04755	Set de administración de macrogoteo	Bolsa x 25 unidades