

INSTRUCCIONES PARA USO

Hyalubrix® SP

HIALURONATO DE SODIO 0,4%

SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL SIN PRESERVANTES

Hyalubrix® SP es un lubricante refrescante para ojos secos y cansados desarrollado para la rehidratación y efecto calmante en los ojos. Está formulado con hialuronato de sodio cuyas propiedades viscoelásticas aumentan la estabilidad de la película lagrimal pre corneal y maximizan el tiempo de residencia de la película lagrimal dentro de los ojos.


COMPOSICIÓN:

Hyalubrix® SP solución oftálmica estéril contiene:

Hialuronato de sodio	0,4% p/v
Base acuosa estéril	c.s.

INDICACIÓN:

Hyalubrix® SP proporciona una lubricación eficaz y duradera para el malestar ocular, con alivio de los síntomas asociados a los ojos secos como picazón, ardor y sensación de cuerpo extraño causado por factores no patológicos como: estrés visual debido a la exposición prolongada a la pantalla del computador/celular o televisión, exposición a condiciones ambientales adversas como contaminación, polvo, humo, sol, viento o aire acondicionado. Destinado a niños mayores de 5 años, adultos y población geriátrica, que se ven afectados por síntomas asociados a los ojos secos o el síndrome del ojo seco (ojo seco crónico), que se caracteriza por una capacidad reducida para formar lágrimas o una reducción en la calidad de esas lágrimas.

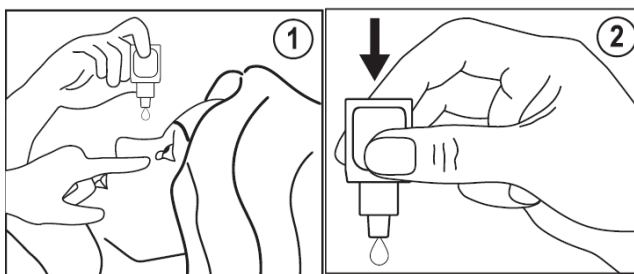

INSTRUCCIONES DE USO:

Coloque 1 o 2 gotas en el(los) ojo(s) según sea necesario o según indicación médica. Si la irritación persiste suspenda su uso y consulte al oftalmólogo:

- Consiga el frasco de Hyalubrix® SP.



- Lávese las manos.
- Tome el frasco y desenrosque la tapa.
- Después de abrir la tapa, retire el sello de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Sostenga el frasco apuntando hacia abajo, con un dedo limpio baje el párpado, hasta que forme un "bolsillo" entre el párpado y su ojo. La gota entrará aquí (imagen 1).
- Acerque la punta del frasco al ojo. Utilice un espejo si le ayuda.
- No toque su ojo o párpado, las áreas circundantes u otra superficie con el gotero. Podría contaminar las gotas que quedan en el frasco.
- Presione suavemente en la base del frasco para liberar una gota de Hyalubrix® SP a la vez.
- No apriete el frasco, está diseñado para que solo se necesite una suave presión en la parte inferior (imagen 2).
- Si usa gotas en ambos ojos, repita los pasos para el otro ojo.
- Vuelva a colocar firmemente la tapa del frasco inmediatamente después de su uso.
- Si una gota no alcanza su ojo, inténtelo de nuevo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para evitar la contaminación o posibles lesiones oculares, no toque la punta del frasco con ninguna superficie y evite el contacto con los ojos.

Cierre bien el frasco inmediatamente después de su uso.

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Una vez abierto el frasco, deseche la solución sobrante después de dos meses.

No utilizar si el envase está dañado o si el sello de seguridad está roto.

Descarte la solución si se vuelve turbia o marrón.

Antes de utilizar Hyalubrix® SP se debe retirar los lentes de contacto. Debe consultar a su oftalmólogo, médico o farmacéutico antes de usar Hyalubrix® SP, si:

- Está embarazada o amamantando;
- Padece cualquier otra enfermedad o trastorno ocular;
- Está usando cualquier otro medicamento en sus ojos.

Podrían aparecer partículas blancas en las pestañas, posterior a la administración del producto. Limpie las áreas alrededor del ojo con un paño limpio humedecido en agua tibia después de la administración de Hyalubrix® SP en caso de ser necesario.

EFECTOS SECUNDARIOS:

Se pueden presentar efectos secundarios tales como:

- Visión borrosa inmediatamente después de su uso. Por ello, no debe operar maquinaria, usar herramientas eléctricas ni conducir automóvil hasta que se haya restablecido una visión clara.
- Irritación de los ojos (incluyendo ardor o molestias), dolor ocular, prurito ocular y/o alteración visual.



En caso de que experimente efectos adversos no mencionados en el inserto, o si hay una irritación prolongada, lagrimeo excesivo, enrojecimiento de los ojos o alteración visual grave o cualquier cambio en su estado general de salud, consulte inmediatamente a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

No use Hyalubrix® SP si es alérgico al Hialuronato de sodio o a alguno de sus componentes.

Fabricado por:

Indiana Ophthalmics LLP 135, 136, 137 – GIDC Industrial Estate 363035, Gujarat, India.

Para: Juvencia Lifesciences Pvt. Ltd. Ahmedabad 380054, India.

Importado, Almacenado y Distribuido por:

Laboratorio Pasteur S.A., Ignacio Serrano 568, Concepción Chile y/o Droguería Laboratorio Pasteur, Camino Apacible N°634, Ciudad de los Valles, Pudahuel, Santiago, Chile y/o Almacenado y Distribuido por: Kuehne & Nagel Ltda. Av. Boulevard Poniente 1313, Pudahuel, Santiago.

Fono consultas Pasteur: 224383100

Certificación I.S.P. N°ANDID/2396/23

PRESENTACIÓN:

Hyalubrix® SP se presenta en un frasco gotario de plástico de 10 mL.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solución oftálmica estéril sin preservantes

**USO OFTÁLMICO. NO INGERIR. NO INYECTAR
NO CONGELAR. SOLO PARA USO EXTERNO**