




4. Presiones el dispositivo de punción en el lado del dedo. Presione el botón de liberación para pinchar la yema del dedo.

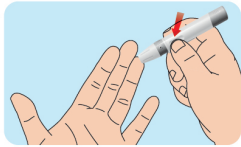

5. Inmediatamente toque la gota de sangre con la punta de la tira reactiva. La punta absorbe la sangre automáticamente. No ponga sangre en la superficie de la tira reactiva.

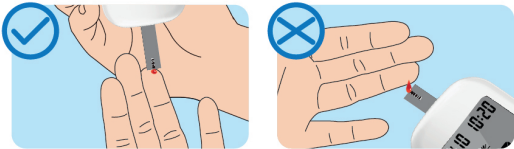

6. El medidor cuenta de 5 a 1 y luego el resultado de la prueba se muestra y se almacena automáticamente en la memoria del medidor.

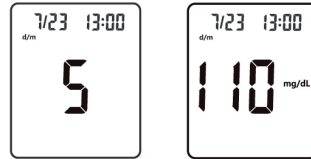

SCANMED
YOUR TRUSTED HEALTH GUARDIAN

Importado y distribuido para:

Chile: Inverlar S.P.A.
Bodegas El Pórtico, Av. Colo Colo # 521,
Puerta #26.
Quilicura - Santiago.

Colombia: Inverlar Colombia S.A.S.
Calle 113 # 7-21, Torre A, Of. # 810.
Edificio Teleport.
Bogotá - Colombia.
Tel. Servicio al cliente
Colombia: (320) 557-8927

Ecuador: Inverlarecu S.A
Calle Naciones Unidas E 2-30 Intersección
Nuñez de Vela.
Edificio Metropolitano, piso 10, oficina 1005.
Quito - Ecuador.
Fono: +59 399 890 2443

Lancing device
Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01, Plant B, No. 278, Hangkong Road,
Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port
Industrial Park) 300308 Tianjin, China
E-mail: huahongsales@163.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany
E-mail: shholding@hotmail.com

Lancets
Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01, Plant B, No. 278, Hangkong Road,
Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port
Industrial Park) 300308 Tianjin, China
E-mail: huahongsales@163.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany
E-mail: shholding@hotmail.com

VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
Yuhang Economy Development Zone,
Hangzhou, 311100, Zhejiang, P.R. China

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA, the Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

Guía de solución de problemas

Consulte el manual del usuario para obtener la solución de problemas y la información completa de errores, o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más ayuda.

Lo que significa	Lo que debe hacer
E 1	La sangre o la solución de control se aplica a la tira reactiva antes de que apareciera en la pantalla un indicador de una gota parpadeando.
E 2	El medidor detecta que está utilizando una tira usada o contaminada.
E 3	Está utilizando una tira reactiva inadecuada.
E 4	La muestra es inadecuada.
E 5	La temperatura está fuera del rango de funcionamiento.
E 6 E 7	Problema de hardware potencial.
E 10	Muestra insuficiente.
E 11	Baja batería.
HI	El resultado de la prueba está por encima de 600 mg/dL (33,3 mmol/L).
LO	El resultado de la prueba está por debajo de 10 mg/dL (0,6 mmol/L).

SCANMED
YOUR TRUSTED HEALTH GUARDIAN

Sistema de monitoreo de
Glucosa en Sangre

Guía de referencia rápida




Lea el manual del usuario para obtener instrucciones completas antes de realizar una prueba de glucosa en la sangre.


Número:
Fecha de entrada en vigor:

CE 0197 IVD

Su tira reactiva y aparato de medición de ScanMed

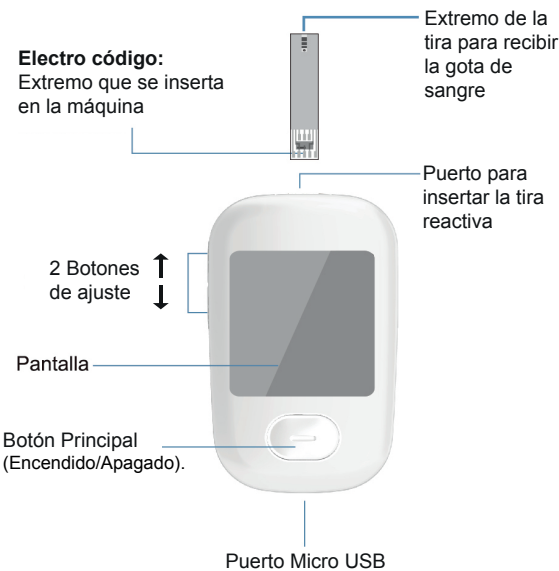


Su dispositivo de punción ScanMed

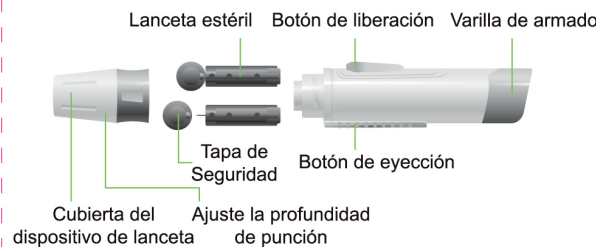


Preparar el dispositivo de punción

Importante: Lave y seque bien las manos antes de comenzar la prueba, pase un algodón o un hisopo mojado en alcohol o en agua jabonosa por la zona donde vaya a realizar la punción. Si fuera necesario, utilice agua templada para aumentar el flujo sanguíneo. Después lave y seque bien las manos y la zona donde realizó la prueba.

- Desenrosque la tapa del dispositivo de punción. Inserte una lanceta estéril en el dispositivo.
- Sostenga la lanceta firmemente en el dispositivo de punción y gire la lengüeta de seguridad de la lanceta hasta que se suelta, a continuación, tire la lengüeta de seguridad, fuera de la lanceta.

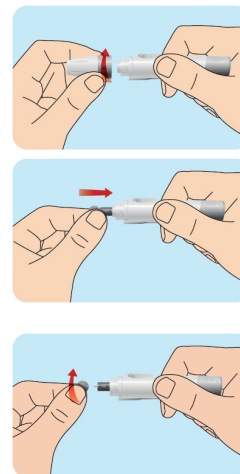

- Vuelva a girar la cubierta con cuidado en el dispositivo de punción.
- Ajuste la profundidad de la punción girando la cubierta del dispositivo, hay 5 niveles donde:
1 es para piel delicada.
2 y 3 piel normal.
4 y 5 para piel gruesa o con callosidades
Nota: Si ejerce una presión mayor del dispositivo de punción contra el dedo también aumentará la profundidad de punción.
- Tire del cargador hacia atrás para preparar el dispositivo.

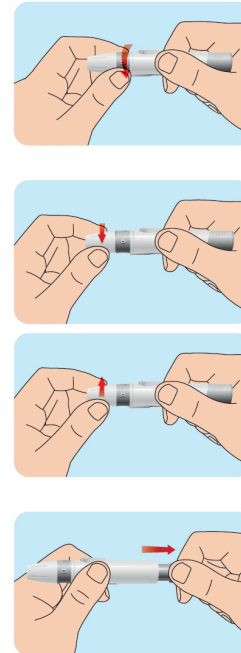

Realización de una prueba de glucosa en sangre

- Saque una tira reactiva del envase de tiras reactivas o de la bolsa de aluminio. Cerrar firmemente la tapa del envase inmediatamente después de sacar la tira reactiva.
- Insertar la tira reactiva en el medidor en la dirección que indican las flechas. El glucómetro se enciende tras emitir un pitido.
- Aparecerá un símbolo con una tira reactiva y una gota de sangre parpadeando, lo que le indica que el glucómetro está listo para realizar la prueba.

