


Soluciones Dentales

3M™ Discos Sof-Lex™

Sistema de Acabado y Pulido

Agosto 7, 2025

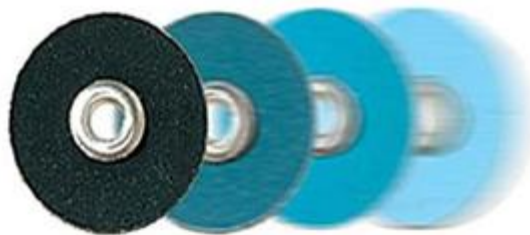

FICHA TÉCNICA

Descripción:

Sistema de pulido y acabado 3M Sof-Lex™, Discos montados sobre cartón. Disponibles en 4 distintos grosores y 2 diámetros adecuados para distintos tamaños y superficies dentales permitiendo crear restauraciones con un alto brillo y confiriendo un resultado estético natural.

Indicados para optimizar la estética de los composite. Combinan un apoyo flexible con un ojillo redondo y un mandril de bajo perfil para aumentar el rendimiento de la superficie útil y abrasiva.

- Discos pulidores flexibles con revestimiento de óxido de aluminio.
- Cuatro niveles distintos de abrasión, de grano grueso a superfino, de fácil identificación de la secuencia del grosor de los granos.
- Cada nivel de abrasión está identificado por un sistema de codificación de color especial.
- Los discos pueden ser cambiados fácilmente gracias al sistema patentado de mandril a presión.
- Mandril metálico resistente a las fracturas y esterilizable.
- Dos tamaños. Dependiendo de la necesidad: 9 mm. ó 13 mm. de diámetro o de 3/8" y 1/2" (pulgadas).

Indicaciones:

Terminado y pulido de restauraciones dentales de resina, ionómero de vidrio y cerámica

Instrucciones generales de aplicación:

	GRUESO	MEDIANO	FINO	SUPER FINO
Color	café	naranja	amarillo oscuro	amarillo claro
	negro	azul oscuro	azul claro	celeste
Función	Reducción Volumen	Contorneado	Terminación	Brillo
Velocidad	10.000 rpm	10.000 rpm	30.000 rpm	30.000 rpm
Tiempo	El necesario	15-20 seg.	15-20 seg.	15-20 seg.
Aplicaciones	Superficies vestibular, lingual, oclusal e incisal			

Presentación:

Cod Munnich	Producto	Presentación
576561	3M DISCOS SOF-LEX 1/2" O 13 MM GRANO GRUESO REF:4851C	BOLSA 30 DISCOS
576567	3M DISCOS SOF-LEX 1/2" O 13 MM GRANO MEDIANO REF:4851M	BOLSA 30 DISCOS
576568	3M DISCOS SOF-LEX 3/8" O 9 MM GRANO GRUESO REF:4850C	BOLSA 30 DISCOS