

Soluciones Dentales

3M™ Transbond™ XT Light Cure Adhesive

Adhesivo para bracket de fotocurado

11 Agosto 2025



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El Adhesivo de Fotocurado 3M™ Transbond™ XT, es un adhesivo fotopolimerizable de uso ortodóntico, indicado para la adhesión de brackets metálicos y cerámicos. El Adhesivo de Fotocurado 3M™ Transbond™ XT, es un reconocido adhesivo ortodóntico frecuentemente utilizado como estándar de oro en estudios científicos de adhesión. Sus propiedades de manipulación le permiten ser dispensado con precisión y sin desperdicio en las bases de los brackets, una vez presentado en el diente, la limpieza de excedentes en los bordes de la base es sencilla y no hay cambios indeseados en la orientación del bracket antes de la fotopolimerización. El Adhesivo para Fotocurado 3M™ Transbond™ XT es compatible con Transbond™ XT Primer, 3M™ Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer y 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer.

- Indicado para la adhesión de brackets metálicos y cerámicos
- Alta fuerza adhesiva
- Fácil limpieza de excedentes alrededor de la base de los brackets
- Adecuado para la confección de attachments para alineadores
- Menos caídas.
- Mejora la productividad en tiempo del ortodoncista (tiempo de consulta).

Indicaciones:

- Este producto está diseñado para el cementado directo de brackets ortodónticos cerámicos y metálicos.
- Las capsulas rellenas de adhesivo y la pistola dispensadora tambien facilitan la aplicación.

Almacenamiento y uso

- 1. No exponga los materiales a temperaturas elevadas o luz intensa. Espere a que el producto alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
 - 2. No guarde el material en las cercanías de productos que contengan eugenol, ya que esto puede provocar un tratamiento inadecuado del adhesivo.
 - 3. Este sistema está diseñado para utilizarlo a temperatura ambiente (20-25 °C, 68-77° F). Guárdelo entre 2-27 °C, 35-80 °F 4.
- La vida útil a temperatura ambiente es la de la fecha de caducidad de la caja del kit.
- 5. Sensible a la luz. No exponga el adhesivo Transbond XT sin tratamiento a luz ambiente durante periodos de tiempo prolongados. Mientras no las esté utilizando, guarde las jeringas con sus tapones a temperatura ambiente.

Presentación

Cod Munnich	Producto	Presentación
527872	Kit Transbond XT en jeringas Ref. 712-035	Kit: 2 jeringas de 4 gr.c/u -1 Primer 6 ml- 60 pinceles- 1 Portapincel
576572	KIT TRANSBOND XT EN JERINGAS REF:712-036	BOLSA 4 jeringas de 4 gr c/u