

Soluciones Dentales

3M™ Transbond™ Plus Color Change Adhesivo,

Ref: 712-101

28 Agosto 2025

FICHA TÉCNICA

Descripción:

El adhesivo 3M™ Transbond™ Plus con cambio de color es un sistema de adhesión ortodóntica fotopolimerizable que ofrece una resistencia de adhesión fiable para brackets metálicos y cerámicos. Disponible en jeringas fáciles de usar, este adhesivo con cambio de color mejora la visibilidad para una colocación precisa de los brackets y la limpieza. Este adhesivo fotopolimerizable es tolerante a la humedad, lo que permite una adhesión ortodontica fiable en condiciones de alta humedad.

Detalle del producto

ndustrias: Ortodoncia Marca: Transbond™

Tipo de producto: Adhesivo para ortodoncia

Tipo de curado: Fotocurado

Sistema de administración: Jeringa

Tipo de adhesivo: Directo

Tolerancia a la humedad para una adhesión más segura cuando el control de la humedad es difícil

Adhesivo de color para una mejor colocación del bracket y una fácil limpieza del exceso antes del curado

Tras el fotocurado, el color se desvanece

Disponible en jeringas fáciles de usar

Resistencia de adhesión comparable a la del adhesivo fotocurable 3M™ Transbond™ XT





Aplicaciones sugeridas

El adhesivo de cambio de color 3M™ Transbond™ Plus está indicado para su uso en la aplicación y unión de aparatos de ortodoncia para el tratamiento de ortodoncia.

Almacenamiento y uso

- 1. No exponga los materiales a temperaturas elevadas ni a la luz intensa. Deje que alcance la temperatura ambiente antes de usarlos.
- 2. No almacene el material cerca de productos que contengan eugenol, ya que esto podría inhibir el curado correcto del adhesivo.
- 3. Este sistema está diseñado para usarse a temperatura ambiente (20-25 °C, 68-77 °F). Almacenamiento entre 2-27 °C, 35-80 °F.4. La vida útil a temperatura ambiente se indica en la fecha de caducidad que figura en la caja del kit. Rote el inventario para optimizar la vida útil.5. Sensible a la luz. No exponga el adhesivo de cambio de color Transbond PLUS sin curar a la luz ambiental durante períodos prolongados. Cuando no esté en uso, guarde las jeringas con tapa a temperatura ambiente.

Presentación

Cod Munnich	Producto	Descripción
563635	3M™Transbond™ Plus Color Change Adhesivo de Fotocurado REF:712-101	Adhesivo para bracket Transbond™ PLUS Color Change (ref. 712-101) , tolerante a la humedad , y con liberación de flúor - Kit 2 jeringas 4 gr c/u - 3M™ Unitek™
576579	3M™Transbond™ Plus Color Change Adhesivo de Fotocurado REF:712-103	Adhesivo para bracket Transbond™ PLUS Color Change (ref. 712-103) , tolerante a la humedad , y con liberación de flúor - Kit 4 jeringas 4 gr c/u - 3M™ Unitek™



2