

Volumatic®

Espaciador Inhalador para utilizar con:

Aerolin® LF
Ventide® LF
Flixotide® LF
Serevent® LF
Seretide® LF

Inhaladores

Lea cuidadosamente este instructivo antes de utilizar **Volumatic®**.

Cuando se emplean inhaladores en aerosol, lo más importante es que el fármaco se libere en el momento en que el paciente inspira.


Algunas personas tienen dificultad para coordinar la pulsación del aerosol y la inspiración.

Volumatic® se ha diseñado para solucionar este problema.

Modo de empleo:

1. Separar las dos partes del **Volumatic®**.


Ensamblar alineando la horquilla de una mitad con la ranura de la otra, presionar.

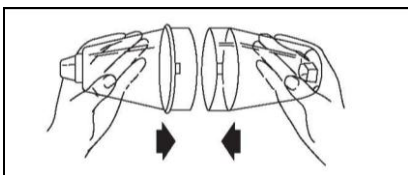


2. Retirar la cubierta protectora de la embocadura del inhalador y agitarlo fuerte y verticalmente.




3. Ajustar el inhalador al orificio del **Volumatic®**, tal como se indica.

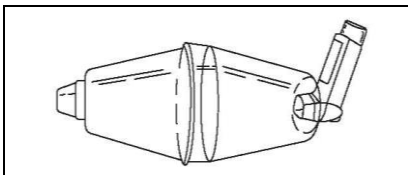

4. Acoplar la embocadura de **Volumatic®** en la boca apretando los labios a su alrededor. Mantener el **Volumatic®** en posición horizontal (ver figura).

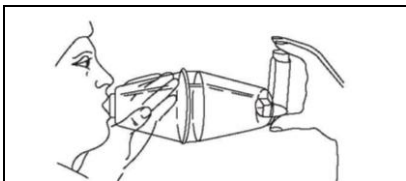

5. Espirar suavemente (no totalmente) y,
6. Efectuar una pulsación del aerosol para liberar una dosis de fármaco e inspirar lenta y profundamente por la boca. Usted también puede realizar 5 inspiraciones normales para asegurar la llegada de su medicina a los pulmones. No es necesario que retire la boca del **Volumatic®** al espirar.

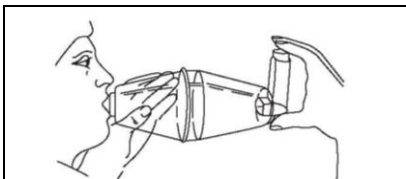

7. Contener la respiración unos 10 segundos aproximadamente, antes de espirar el aire lentamente.
8. En caso de necesitar una segunda dosis, esperar un minuto como mínimo antes de repetir los puntos del 4 al 7.
9. Una vez utilizado, retirar el inhalador y taparlo nuevamente.

Nota: En los casos en que el médico dé unas instrucciones de uso del inhalador distintas, seguir cuidadosamente sus instrucciones y consultarle si apareciese cualquier problema.

Limpieza: Para limpiar, separar las dos partes del **Volumatic®** tirando de ellas y enjuagar en agua tibia. Secar cuidadosamente y guardar.

Precaución: Leer cuidadosamente el prospecto de **Aerolin® LF**, **Ventide® LF**, **Flixotide® LF**, **Serevent® LF**, o **Seretide® LF** inhaladores (según corresponda) antes de utilizar el **Volumatic®**.

Importado y distribuido por GlaxoSmithKline Chile Farmacéutica Ltda., Lo Boza 107, Módulo A-6, Pudahuel, Santiago. Teléfono 3829000.