



# Venda Elástica Autoadherente Coban<sup>®</sup>

- Venda elástica cohesiva que se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel.

## CARACTERÍSTICAS

Venda elástica con soporte poroso de poliéster con filamentos distensibles de Dacron y adhesivo cohesivo.  
Resistente al agua.  
Se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel.  
Producto en versiones no estéril y estéril.  
Envoltorio protector individual y transparente para cada venda.  
Este producto contiene latex.

## VENTAJAS

No requiere del uso de ganchos o alfileres para su fijación como las vendas elásticas convencionales.  
Remoción a traumática.  
Producto versátil de diversas dimensiones.

## BENEFICIOS

A diferencia de las vendas convencionales, la tensión con la que se aplica permanece sin alteraciones, independiente del nivel de actividad del paciente.  
Ideal para la fijación de dispositivos de uso médico en pieles comprometidas.  
No altera el normal funcionamiento de la piel.  
No es tóxico y no provoca irritación a la piel.



# Se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel.

## ■ Usos:

- El diseño versátil de Coban<sup>®</sup> permite su uso para:
- Inmovilizar extremidades.
- Controlar edema o inflamación.
- Fijar apósitos y dispositivos sobre pieles sanas o dañadas.
- Vendajes quirúrgicos, protectores y de rehabilitación.

Ideal en medicina deportiva para proteger articulaciones expuestas a sobre carga de trabajo.

## ■ Aplicaciones:

Coban<sup>®</sup> no es como otros vendajes, este vendaje no se va a soltar con el tiempo, por lo que la presión inicial se mantendrá en el tiempo sin ceder. Debe quedar cómodo desde un principio.

Desenrolle 30 cms de vendaje y permita que la venda no esté tensio-nada.

Para iniciar aplique una vuelta completa sin tensión y ejerza presión para que se fije al cuerpo.

Preceda avanzando hacia la extremidad ejerciendo la compresión deseada. Siempre desenrolle la venda para no exceder la compresión de la venda.

El vendaje se irá adhiriendo a la capa anterior.

Cuando termine la aplicación del vendaje, corte el excedente y asegúrese de que quede cómodo para el paciente.



| Código Producto | Descripción                | Tamaño / Unidad   | Unidad de Venta | Unidades de Productos |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1582            | Coban <sup>®</sup>         | 5 cms x 4,6 mts   | Caja            | 36 Rollos             |
| 1583            | Coban <sup>®</sup>         | 7,5 cms x 4,6 mts | Caja            | 24 Rollos             |
| 1584            | Coban <sup>®</sup>         | 10 cms x 4,6 mts  | Caja            | 18 Rollos             |
| 1584S           | Coban <sup>®</sup> Estéril | 10 cms x 4,6 mts  | Caja            | 18 Rollos             |
| 1483B           | Coban <sup>®</sup> Azul    | 7,5 cms x 4,6 mts | Caja            | 24 Rollos             |
| 1583W           | Coban <sup>®</sup> Blanca  | 7,5 cms x 4,6 mts | Caja            | 24 Rollos             |



División Médica  
3M Chile S.A.  
Santa Isabel 1001. Providencia  
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com  
Tel. 600 300 3636  
www.3M.cl