



Cinta Quirúrgica Microfoam[®]

- Cinta quirúrgica de espuma elástica y compresiva.

CARACTERÍSTICAS

Cinta quirúrgica de espuma distensible con soporte de cloruro de polivinilo oclusivo y adhesivo hipoalergénico de acrilato.

VENTAJAS

3M Microfoam[®] es sensible a la presión y con adherencia inicial suave pero potente a la vez. Además puede ser distendida hasta en un 200% de su tamaño. La cinta 3M Microfoam[®] es libre de látex.

BENEFICIOS

El soporte exterior de 3M Microfoam[®] es impermeable a líquidos. 3M Microfoam[®] es altamente confortable y puede ser usada en zonas desafiantes como: cuello, cabeza, codo, rodilla o talón. Diseñada para aplicaciones que requieren compresión o deben acomodar edema o inflamación.



Microfoam^R es altamente comfortable.

■ Aplicaciones:

- Asegurar apósitos en zonas de movilidad u otras zonas desafiantes.
- Asegurar apósitos con compresión para hacer hemostásis o para controlar edema.
- Proveer acolchamiento.

■ Uso en situaciones que requieran compresión:

- Coloque un lado de la cinta sin tensión y ejerciendo fuerza a un lado del apósito de gasa que va usar.
- Sujutando con una mano el extremo ya adherido, estire la cinta hasta el otro extremo del apósito.
- Retenga ahí la presión con la primera mano y deje caer la cinta sobre la piel, para luego hacer presión sobre el otro extremo.
- La compresión se ejercerá en el apósito y no en los extremos.

■ Retiro:

- Desprender un extremo y desde este retirar en 180° a favor del crecimiento del vello, sosteniendo la piel donde estaba adherida la cinta.
- Hágalo de forma suave para minimizar el daño en la piel frágil.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1528-2	3M Microfoam ^R	5 cms x 5 mts	Caja	6 Rollos
1528-3	3M Microfoam ^R	7.5 cms x 5 mts	Caja	4 Rollos
1528-4	3M Microfoam ^R	10 cms x 5 mts	Caja	3 Rollos



División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001. Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl