



Control de Equipo Comply^R Bowie-Dick

- Completa línea de validación del funcionamiento del equipo Autoclave a través del test de Bowie-Dick. Nuestra solución incorpora un exclusivo test Bowie - Dick Plus el cual provee detección más temprana de fallas del equipo Autoclave, logrando realizar mantenencias programadas sin detener el proceso de Esterilización.

CARACTERISTICAS

Indicador químico que controla el buen funcionamiento del equipo.

3M ofrece tres tecnologías de control:

- 1) Comply^RBowie – Dick Hoja.
- 2) Comply^RBowie – Dick en paquete.
- 3) Comply^RBowie – Dick Plus (2 hojas de control).

El Comply^RBowie – Dick verifica el funcionamiento de la bomba de vacío a través de la monitorización de la hoja indicadora que vira a negro.

El Comply^RBowie – Dick Plus posee dos hojas. La primera hoja; test clásico Bowie – Dick y la segunda hoja con un indicador más sensible que avisa tempranamente un fallo en el proceso.

VENTAJAS

- Los packs eliminan los costos de preparación del test.
- Es costo beneficio para la institución.
- Cumple con regulación y recomendaciones AAMI ST46.
- El Comply^R Bowie – Dick Plus avisa de las fallas del vacío antes que los indicadores clásicos.

BENEFICIOS

- El Comply^R Bowie – Dick Plus ofrece la opción de que estando aprobado el test clásico (hoja 1) puede continuar el proceso de esterilización aunque no este virada la hoja dos, pero con alerta de reparación.
- Permite continuar esterilizando hasta que el equipo sea revisado.
- Es costo beneficio porque se podrá hacer mantención programadas del equipo antes de la falla y detención del equipo.





Como interpretar el Test de Bowie-Dick Plus.

Aprobado:


No hay filtración de aire.

Ambos test muestran una buena eficiencia de vacío. La hoja indicadora de aviso temprano vira a negro.

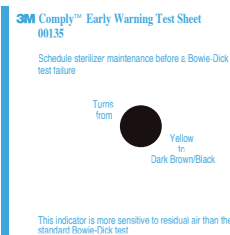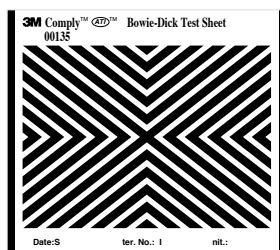


Aprobado:

La hoja indicadora de aviso temprano vira a café oscuro mostrando una reducción en la eficiencia del vacío. La hoja del test de Bowie-Dick muestra un resultado aceptable.


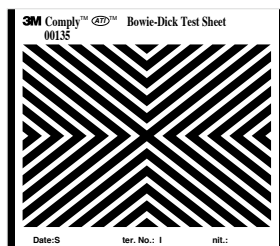


Programa prontamente una revisión para evitar posibles filtraciones.

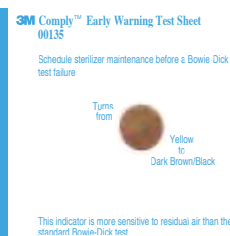


Rechazado:

El test Bowie-Dick y la hoja indicadora de aviso temprano indican que es necesario revisar y/o reparar el equipo.

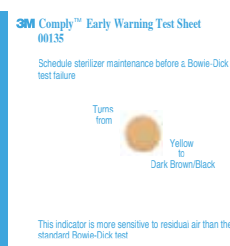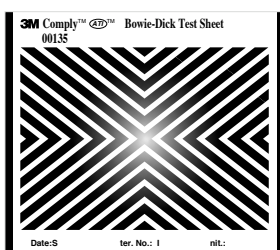

Rechazado:

El test Bowie-Dick y la hoja indicadora de aviso temprano indican que el equipo debe ser reparado.

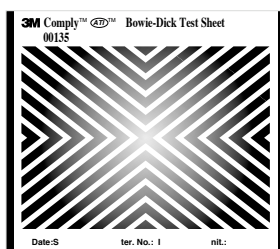

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
130	Comply® Hoja Bowie - Dick	Hoja	Paquete	50
1233	Comply® Bowie - Dick Test en Paquete	Paquete	Caja	30
135	Comply® Hoja Bowie - Dick Plus Test en Paquete	Paquete	Caja	20