

■ El apósito con plata 3M Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh libera plata iónica en forma rápida, efectiva y sostenida en el tiempo.

### CARACTERISTICAS

El apósito con plata 3M Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh es un apósito no tejido que contiene sulfato de plata en concentración de 8 mg/g de apósito. El sulfato de plata se libera como iones de plata y crea una barrera antimicrobiana eficaz hasta 7 días. Su estructura suave y no oclusiva se adapta al lecho de la herida.

# VENTAJAS

3M Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh puede cortarse a medida. Además puede absorber exudado leve.

Las partículas de sulfato de plata cubren la superficie de las fibras de algodón del apósito. Cuando la solución salina estéril o exudado entra en contacto con el apósito, el sulfato de plata se disuelve, liberando iones de plata en forma rápida y sostenida.

Versátil: permite usarse en distintos circunstancias de exudado puede asociarse con Hidrocoloides, alginatos e hidrogeles.

### BENEFICIOS

Los apósitos 3M Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh ofrecen una rápida reducción de la carga microbiana . Además de ser una Barrera antimicrobiana de duración prolongada (Hasta 7 días; consulte protocolos locales)

Estudios han demostrado efectividad contra una gran variedad de micro organismos, incluyendo bacterias resistentes a antibióticos, levaduras y hongos.





# Su estructura suave y no oclusiva se adapta al lecho de la herida.

### Indicaciones:

El apósito antimicrobiano Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh se puede utilizar en heridas infectadas o colonización crónica, en los siguientes casos: Úlceras venosas, Úlceras arteriales, Úlceras por presión, Heridas quirúrgicas abiertas.

## Modo de Empleo

Siga el protocolo clínico para la prevención y control de las infecciones de su institución.

Si va a usar un apósito adhesivo secundario, recorte el vello alrededor de la herida.

Limpie la herida y la piel circundante.

Valore la herida y seleccione el tamaño del apósito de modo tal que cubra la herida hasta el borde de la misma, sin que se superponga sobre la piel circundante. El apósito Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh puede cortarse para permitir este procedimiento.

Fije el apósito con una cobertura secundaria adecuada para ayudar a controlar el exudado y mantener la herida húmeda.

Para heridas secas o con escaso exudado, puede humedecer el apósito con solución salina normal estéril o agua estéril para otorgar un medio húmedo a la herida.

En heridas con exudado moderado o abundante no es necesario humedecer el apósito.

Cambie el apósito cada vez que sea necesario. La frecuencia del cambio depende de muchos factores como el tipo de herida, la cantidad de exudado y los protocolos locales.

El apósito Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh mantiene su eficacia hasta por siete días.

Si al momento de cambiarlo, el apósito esta adherido a la superficie de la herida, satúrelo con solución salina normal estéril o agua estéril, deje que se ablande y retírelo cuidadosamente.

### APLICACIÓN BAJO SUPERVISION MÉDICA

### **Precauciones**

El apósito 3M Tegaderm<sup>R</sup> Ag Mesh con sulfato de plata no se debe utilizar en personas con hipersensibilidad conocida a la plata o al algodón. Este producto no esta indicado para ser usado como esponja quirúrgica o en quemaduras de tercer grado.





Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90500	Tegaderm <sup>R</sup> Ag Mesh	5 cm x 5 cm	Caja	5 unidades
90501	Tegaderm <sup>R</sup> Ag Mesh	10 cm x 12.7 cm	Caja	5 unidades