



Calcetines Terapéuticos Futuro[®] compresión 20-30 mm/Hg

- Calcetines compresivos de fácil uso, para prevención o tratamiento de edema y linfedema.

CARACTERÍSTICAS

Los calcetines compresivos Futuro[®] de 3M, están especialmente diseñados para prevenir el edema o linfedema de las extremidades inferiores. Gracias a esta característica, son de gran utilidad en la prevención de úlceras venosas y sensación de cansancio o pesadez en las piernas.

Proporcionan compresión de 20-30 mm/Hg a nivel del tobillo, disminuyendo gradualmente hasta llegar a la pantorrilla.

Otorgan un masaje constante de las extremidades al caminar.

Están fabricados de 80% Nylon y 20% Spandex, con punta abierta y terminaciones suaves.

Presentación en cajas de 1 par.

VENTAJAS

Su punta abierta y terminaciones suaves, proporcionan alto nivel de confort, mejoran su adaptabilidad y facilitan su aplicación.

Sus terminaciones y talón reforzado proporcionan mayor durabilidad.

Poseen una banda superior de confort que previene su deslizamiento.



BENEFICIOS

Gracias a sus suaves terminaciones, mejoran la adherencia de sus pacientes al tratamiento compresivo.

Son ideales para desarrollar las actividades diarias y se acomodan a la arquitectura de la extremidad sin deslizarse.

Proporcionan un masaje constante de la extremidad con niveles adecuados de compresión.

Gran utilidad en la prevención de úlceras venosas y sensación de cansancio o pesadez en las piernas.



Consejos para la aplicación.

Introduzca su mano por la región superior del calcetín hasta tomar el talón.

Deslice el material de manera de quedar el tejido interno y talón expuestos.

Con sus dedos, separe la punta del calcetín e introduzca el pie del paciente por ese espacio hasta llegar al talón.

Deslice suavemente una capa sobre la otra por la extremidad hasta estirar completamente el calcetín, cuidando de no dejar arrugas.

Consejos para el mantenimiento.

Lave con agua tibia y detergente suave. No estruje. elimine el exceso de agua con toallas.

Pueden secarse con aire tibio o en programas de secado a baja temperatura.

Reemplace sus calcetines cada 3 ó 6 meses dependiendo del uso o mantenimiento.

Precauciones:

Los calcetines compresivos no están indicados en pacientes con patología arterial.

En pacientes con Diabetes Mellitus de larga data, se deben usar con precaución por el riesgo de tener enfermedad microvascular.

Código Producto	Descripción	Medidas	Unidad de Venta	Unidades de Productos
71032	Calcetines compresivos Unisex	Talla S	Caja	Un par
71033	Calcetines compresivos Unisex	Talla M	Caja	Un par
71050	Calcetines compresivos Unisex	Talla L	Caja	Un par
71051	Calcetines compresivos Unisex	Talla XL	Caja	Un par