



Kit de Inserción Periférica

- Kit para la inserción de catéteres venosos periféricos en adultos.

CARACTERÍSTICAS

Kit de empaque transparente de nylon biorentado termosellado con una muesca "abre fácil" que incluye los insumos necesarios para realizar el procedimiento de la instalación del catéter venoso periférico en adultos.

Contenido: 1 Tegaderm® I.V. Adulto 1633 (7 X 8,5 CMS), Sobre con 2 gasas estériles, 4 sachet de alcohol isopropílico al 70%, 1 torniquete desechable libre de látex, 1 rollo corto de cinta Transpore (2,5 x 1,37 mts.), 1 par de guantes de vinilo talla M.

VENTAJAS

Incluye los insumos necesarios para el procedimiento de la instalación de un catéter venoso periférico. Incorpora el Tegaderm® I.V. 1633 que está especialmente diseñado para lograr una correcta fijación y monitorización del catéter que use la institución.

Todos los insumos bajo un mismo código de barra.

Evita desperdicio de Cinta Transpore y otros insumos.

Todos sus componentes son hipoalergénicos y Libres de látex.

BENEFICIOS

Permite ahorrar tiempo a la enfermera al no tener que recolectar cada uno de los insumos y al momento de cargar el costos a la cuenta del paciente.

Permite estandarizar el procedimiento de instalación del CVP.

Al incorporar un torniquete desechable, evita la contaminación cruzada.

Contiene rollo con la cantidad justa de cinta Transpore® que se necesita para el procedimiento, evitando el desperdicio de cinta.

Evita las mermas para la institución al cargar todos los insumos usados en un solo código a la cuenta del paciente.



De una sola vez todos los insumos necesarios para el procedimiento de la instalación de un catéter venoso periférico en adultos.

■ Usos y Aplicación:

Este kit fue diseñado para hacer más fácil el trabajo de las enfermeras al momento de realizar el procedimiento de instalación de una vía venosa periférica. Al tener en un solo empaque todos los insumos necesarios para realizar la inserción del CVP, ahorrando tiempo al no tener que recolectar producto por producto, además, facilita el cargo del costo a la cuenta del paciente al tener todos los insumos bajo un solo código.

Abra el empaque transparente y deje caer los insumos en la zona limpia donde trabajará, luego disponga cada uno de los insumos sobre la superficie escogida y proceda a comenzar a realizar el procedimiento según el protocolo de su institución.

■ Técnica de Inserción de CVP

1. Informar al paciente de la necesidad de aplicar una vía periférica.
2. Colocar al paciente en posición cómoda.
3. Lavado de la zona con agua y jabón.
4. Tome el Kit de Inserción de catéter periférico 3M y ábralo sobre la área limpia.
5. Prepare la solución de irrigación y los equipamientos.
6. Lave las manos.
7. Colocación de guantes.
8. Posicione la mano del paciente en el campo aséptico y aplique un torniquete descartable; localice la vena y libere el torniquete.
9. Apriete el torniquete.
10. Aplicar antiséptico en el sitio IV Alcohol 70% con fricción “adelante-atrás”, Reaplicar cada vez que se palpe el sitio.

11. Inserte el catéter, y limpie con una gasa estéril los restos de sangre que pudieran quedar alrededor del sitio de inserción.
12. Cubra y asegure el catéter con Tegaderm® IV 1633 y fije el alargador con cinta Transpore.
13. Deshágase de los objetos punzantes y equipamiento.
14. Limpie la bandeja; deshágase de los guantes e inmediatamente; límpiense las manos con agua y jabón o alcohol gel.

N. Moureau. Preventing peripheral intravenous line infections: Recommendations for Healthcare Facilities. Journal of AVA, 2009, 14 (4): 187-190.



Este kit no incorpora el catéter.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
5002	Kit Inserción de CVP Adulto Tegaderm® IV 1633	17 cm x 25 cm	Caja	100