

FICHA TECNICA


Apósito de Hidrofibra AQUACEL®

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Apósito de Hidrofibra , 100% carboximetilcelulosa sódica.
Nombre Comercial	Apósito de Hidrofibra Aquacel®
Descripción	Apósito de Hidrofibra , 100% Carboximetilcelulosa sódica, que forma un gel en el lecho de la herida , manteniendo un medio húmedo óptimo para el proceso de cicatrización.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited - Reino Unido
Composición del Producto	Fibras de Carboximetil-Celulosa Sódica al 100% ,entrelazadas con la técnica de punzado con agujas – Polisorbato 20.
Características y Beneficios del Producto	Alta Capacidad de Absorción hasta 25 veces su propio peso en fluidos, reduciendo la frecuencia de cambios del apósito Absorción Vertical y Control Lateral: El control lateral del exudado mantiene el fluido de la herida lejos de los bordes, previniendo la maceración de la piel perilesional y reduce los riesgos de filtraciones tempranas o maceración de la piel circundante, permite cambios hasta 7 días en heridas agudas y crónicas. Retención de Exudado y bacterias: Acción hidrofílica, capaz de absorber los fluidos y bacterias dentro de sus fibras, dejando limpio el lecho de la herida. Medio Ambiente Húmedo: Al gelificarse en contacto con la herida favorece el desbridamiento autolítico y la promoción de tejido de granulación y epitelización. Formación de Gel Cohesivo: conformándose al lecho de la herida, entregándole la humedad y temperatura adecuada. Además facilita la remoción atraumática en una pieza sin dejar residuos en la herida.
Indicaciones	Úlceras y heridas de moderada y altamente exudativas Úlceras por presión, úlceras vasculares (venosas, arteriales, diabéticas), quemaduras, heridas quirúrgicas abiertas, heridas traumáticas.
Recomendaciones de Uso	- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. - Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante - Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas. - Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia y/o aplicar gel hidrocoloide para potenciar debridación autolítica. - Elegir un tamaño de apósito que sobrepase por lo menos 3 cms. , el tamaño de la lesión en el caso de heridas planas, en heridas profundas y amplias se puede colocar todo el apósito dentro del lecho de la herida y en túneles o cavidades se recomienda AQUACEL® Mecha. - Cambiar el apósito cuando esté saturado y/o según criterio clínico. Promedio de duración de 1 a 7 días.

Certificaciones	Latex free (2013) Environmental Statement (2013) Formaldehyde free Statement (2013)
Soporte Científico	1. <i>Biomaterials</i>. 2003;24(5):883-890. 2. Tachi M, Hirabayashi S, Yonehara Y, Suzuki Y, Bowler P. Comparison of bacteria-retaining ability of absorbent wound dressings. <i>Int Wound J</i>. 2004;1(3):177-181. 3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethyl cellulose (Aquacel) and alginate dressings. <i>Biomaterials</i>. 2003;24:883-890.

Código	Presentación	Unidades por Caja
CVT1187903	Aquacel 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas)	Caja 10 unidades
CVT1187286	Aquacel 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas)	Caja 10 unidades
CVT1187295	Aquacel 15 x 15 cm (6 x 6 pulgadas)	Caja 5 unidades
CVT1247673	Aquacel Cavity Cinta 2 x 45 cm	Caja 5 unidades

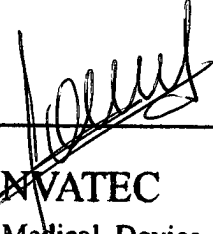


CONVATEC
 Boston Medical Device
 De Chile S.A.

PAULINA
Di Giacomini