

AGUJA SUBERMICA CORKSCREW



Descripción

Dispositivo para el monitoreo neurológico durante el proceso intraoperatorio que conecta el equipo y el cuerpo humano para realizar pruebas de electroencefalografía y potenciales evocados proporcionando al médico la evaluación objetiva de la actividad cerebral durante la cirugía y para guiar si el nervio de las partes lesionadas está siendo afectado.

length		color	part #
1.2 m	48 in	multi	302357-000
2 m	80 in	multi	302358-000

Finalidad de uso

Dispositivo de uso desechable /su propósito previsto conducir electricidad a través de los equipos de monitoreo quirúrgico.

Contraindicaciones

Ninguna

Advertencias y precauciones generales

1. Evitar el uso de sistemas electroquirúrgicos cerca, puede causar quemaduras graves.
2. No reutilizar. Es posible la entrada y salida de materiales biopeligrosos.
3. No volver a esterilizar. El dispositivo no es compatible con métodos que no sean EO.

Esterilización

Esterilizado mediante esterilización con óxido de etileno (ETO).

Presentación/empaque

Unidad por paquete

Agujas subdèrmicas codificadas por colores.

Información de funcionamiento

1. No utilizar si el embalaje ha sido dañado o abierto
2. Verifique el uso por fecha. No usar si la fecha ha expirado
3. Retire el dispositivo de las bolsas externas e internas
4. Inspeccione el dispositivo en busca de daños antes de usarlo
5. Conecte el dispositivo al equipo de monitoreo
6. Enrutar los cables de plomo lejos del paciente
7. Verifique la conexión mecánica y eléctrica antes de su uso
8. Deseche después de su uso en un recipiente designado. No reutilizar ni volver a esterilizar