

AGUJA SUBERMICA



Descripción

Aguja subdérmica única con punta ultraafilada para una baja resistencia a la penetración. Su uso es compatible con equipos de electroencefalografía (EEG), potenciales evocados (EP) o monitorización intraoperatoria (IOM) de conformidad con la norma CEI 60601-1 con entrada DIN 42-802.

length		needle		diameter		part #
1m	40 in	13mm	0.5 in	0.4mm	27G	302353-000-040
1.5m	60 in	13mm	0.5 in	0.4mm	27G	302353-000-060
2m	80 in	13mm	0.5 in	0.4mm	27G	302353-000-080
2.5m	100 in	13mm	0.5 in	0.4mm	27G	302353-000-100

Finalidad de uso

Dispositivo de uso desechable /su propósito previsto conducir electricidad a través de los equipos de monitoreo quirúrgico.

Contraindicaciones

Ninguna

Advertencias y precauciones generales

1. Evitar el uso de sistemas electroquirúrgicos cerca, puede causar quemaduras graves.
2. No reutilizar. Es posible la entrada y salida de materiales biopeligrosos.
3. No volver a esterilizar. El dispositivo no es compatible con métodos que no sean EO.

Esterilización

Esterilizado mediante esterilización con óxido de etileno (ETO).

Presentación/empaque

Unidad por paquete
Agujas codificadas por colores.

Información de funcionamiento

1. No utilizar si el embalaje ha sido dañado o abierto
2. Verifique el uso por fecha. No usar si la fecha ha expirado
3. Retire el dispositivo de las bolsas externas
4. Inspeccione el dispositivo en busca de daños antes de usarlo
5. Conecte el dispositivo al equipo de monitoreo
6. Durante el uso, los electrodos deben colocarse lo más lejos posible del equipo que genera interferencias electromagnéticas (EMI) para reducir al mínimo las interferencias de radiofrecuencia (RFI) no deseadas.
7. Verifique la conexión mecánica y eléctrica antes de su uso
8. Deseche después de su uso en un recipiente designado. No reutilizar ni volver a esterilizar