


ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE - EMG

REFERENCIA	DTM-1.50 SAF
ESPECIFICACIONES	37mm (3.7 cm) X 27 Calibre 50 Electrodo en paquete individual
	Para Uso : DIA/MES/AÑO
ESTERILIZACIÓN	Proceso de esterilización constante, Paquete individual sellado
	Uso único paciente
	Mantener en un lugar fresco y seco
	Atención: Lea las instrucciones al respaldo
 Autorizado	Representante Europeo Advena Medical, Ltda Warwick CV34 6W E UK Telefono: 44(0)1926800153 Fax: 44(0)1568620078
 0086	
	Hecho en U.S.A por The Electrode Store 159 West Mason Avenue Buckley, Wa 98321 USA 800-537-1093 360-829-0400 www.electrodestore.com

The Electrode Store ® Electrodo de aguja están destinados para la grabación y / o estimulante de señales bio-eléctricas en electromiografía de diagnóstico subcutáneos.

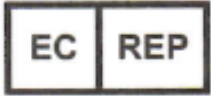

Instrucciones de uso:

1. preparar lugar de inserción de la aguja como para una inyección hipodérmica.
2. Inserte la aguja a una profundidad intramuscular adecuada para registrar señales bio-eléctricas en el diagnóstico de electromiografía.
3. Después de completar examen disponer de aguja usada en un contenedor objetos punzantes apropiada.

***PRECAUCIÓN**



*Posible transmisión de la enfermedad: La aguja debe ser destruida, según los procedimientos de eliminación de objetos punzantes.

* Ley federal (USA) restringe la venta de este dispositivo a, o por orden de, un médico.

*** POSIBLES LESIONES EN EL PACIENTE**

* Uso de agujas longitud adecuada para la profundidad del nervio para ser evaluado

* Uso excesivo de la fuerza durante la inserción puede complicar la retirada de la aguja.

*DIN 42 802 Cumple

* Un solo uso, destruir después de su uso.

* No puede garantizarse la Integridad del electrodo si se utiliza de nuevo.

* Paquete individual estéril a menos que esté dañado o abierto

