

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

10-5016-1, 10-5067-1, 10-5016-5, 10-5067-6 Retractor de Iris Desechable
 10-5127 Retractor de Iris Reusable

Nombre	Material	Funciones	Detalle
			10-5016-1 Retractor de Iris Desechable 1 paquete de 4 piezas (4 retractores) 10-5016-5 Retractor de Iris Desechable 5 paquete de 4 piezas (20 retractores) 10-5067-1 Retractor de Iris Desechable 1 paquete de 5 piezas (5 retractores) 10-5067-6 Retractor de Iris Desechable 6 paquete de 5 piezas (30 retractores) 10-5127 Retractor de Iris Reusable 1 paquete de 6 piezas en contenedor de teflón (6 retractores)
1) Parte de trabajo	polipropileno	se usa para la separación segura y fácil de los tejidos del iris durante las cirugías	
2) Limitador	silicona	para controlar la acción de separación	

Descripción

El retractor de iris está fabricado de fibra de polipropileno azul brillante y tiene un fijador de silicona ajustable, para la fijación temporal del iris durante la cirugía. En los casos donde la dilatación del iris no puede lograrse farmacológicamente, el retractor de iris es una alternativa simple, rápida y segura. El retractor de iris dilata y retiene suavemente el iris para una máxima visibilidad durante el procedimiento quirúrgico.

Indicaciones

El retractor de iris se utiliza para dilatar el iris de forma manual en las pupilas pequeñas, durante las cirugías del segmento anterior y posterior.

Precauciones

- No lo use, si el paquete ha sido abierto o dañado.
- No utilizar si se excede la fecha de caducidad que se muestra en la etiqueta.

- Este producto es para un solo uso. No reusar. No volver a esterilizar.
- La reutilización y / o re-esterilización puede comprometer el rendimiento del dispositivo, lo que podría causar daños graves a la salud y seguridad del paciente.

Advertencias

(EE. UU.) La ley federal restringe la venta de este dispositivo a un médico autorizado o por orden suya.

Inserción:

- Abra la bolsa y retire el blíster, que contiene los retractores de iris.
- La córnea debe estar libre, para controlar el posicionamiento de los retractores.
- Realice una incisión auto sellante en el limbo, con un cuchillete con forma de espátula de 0.5 mm de ancho.
- Sostenga el retractor con un pequeño portaguñas o unas pinzas, cerca del extremo en forma de gancho e introduzca el retractor en el ojo a través de la incisión.
- Gire el portaguñas, para que el retractor pueda engancharse al borde del iris y retraerse tanto como sea necesario hacia el sitio de entrada. Ajuste el retractor a la posición y tensión apropiadas moviendo el fijador de silicona, hacia la córnea.

Rumex International Co.

Product registration and certification manager

Sergey Vlasov

