

■ Descripción del dispositivo médico:

SUTURAS NYLON MANI

Grupo de productos:	Suturas quirúrgicas.
Nombre general:	sutura de nylon.
Nombre del producto:	SUTURAS NYLON MANI
Código GMDN:	38000
Clasificación:	Clase b, Regla 8, primer párrafo según el anexo IX de la Directiva 93/42 / CEE.

■ Indicaciones:

Este producto se utiliza para cerrar o ligar el tejido o para fijar un dispositivo médico al tejido.

■ Contraindicaciones:

- No usar en pacientes con sensibilidad y / o alergia a los metales.
- Aunque esta sutura no es absorbible, pierde lentamente su resistencia a la tracción in vivo, ya que se descompone con el tiempo. No usar en una región que requiera resistencia a la tracción permanente.
- No usar excepto en los campos de oftalmología y odontología.
- La reutilización o la reesterilización podrían comprometer seriamente la integridad estructural y / o podrían provocar daños o infecciones a los pacientes.
- Después de abrir el paquete, deseche los productos que no fueron utilizados.

■ Advertencias:

- El riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el sitio de aplicación; por lo tanto, este producto solo debe ser utilizado por cirujanos debidamente capacitados y calificados con: procedimientos quirúrgicos, técnicas y manejo de las suturas.
- Cuando use la sutura en una herida contaminada o infectada, realice el tratamiento quirúrgico adecuado antes de usar.
- Al igual que con cualquier cuerpo extraño, cuando la sutura entra en contacto prolongado con soluciones salinas, en lugares como los sistemas urinarios o de vesícula biliar, puede causar la formación de cálculos.

■ Componentes principales, accesorios:

Sutura:	Nylon 6,6
El colorante aditivo:	Hematina.
Aguja:	Acero inoxidable (que contiene níquel y cromo).
Esterilización:	gas de óxido de etileno (EOG)
Embalaje interno:	Polietileno y Poliéster.
Paquete externo:	Papel
Envoltura retráctil:	polipropileno

Doce (12) piezas por caja.


Listo para usar.

■ **Relación con los pacientes:**

No usar en pacientes con sensibilidad y / o alergia a los metales.

■ **Descripción funcional:**

La longitud del hilo de sutura, la forma de la cuchilla y su curvatura se pueden seleccionar y se pueden combinar libremente siempre que cumpla con el estándar de prueba.
La clasificación del tipo de sutura es la siguiente: Sutura con un solo brazo, doble brazo, con agujas con bucle y hilo de sutura en sí. Este producto es un instrumento esterilizado.

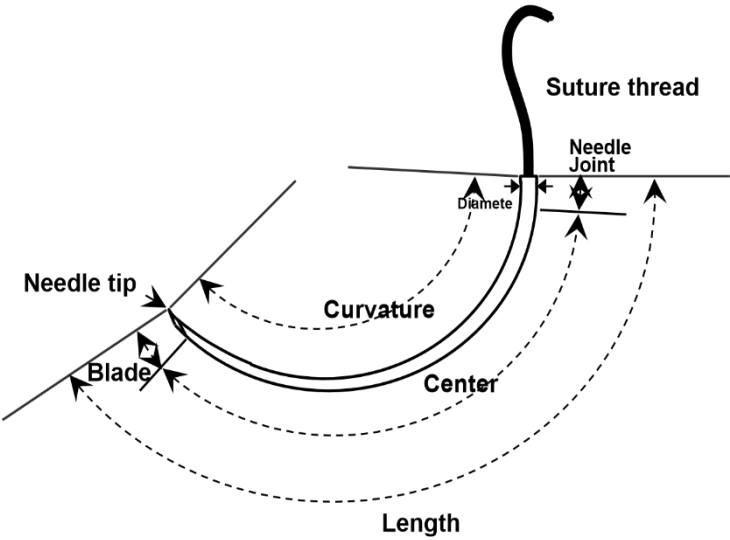

■ **Referencias:**

11 – 0 (0.1 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACION PRINCIPAL	REF
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Nylon Monofilamento Negro	13cm		4.0	3/8 135°	0.05	OE04-05	Para laboratorios	0550S
	20cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	Corneoescleral	1000
	10cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	Corneoescleral	1000S
	20CM	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1403
	30CM	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1476
	15CM	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1478S

10 – 0 (0.2 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA				CÓDIGO	APLICACIÓN Y/O USO	REF
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)			
Nylon Monofilamento Negro	30cm	Espatulada	5.0	Bi-curvo 90° / 50°	0.14	ZB05-14	Corneoescleral	1401
	15cm	Espatulada	5.0	Bi-curvo 90° / 50°	0.14	ZB05-14	Corneoescleral	1401S
	20cm	Espatulada	5.0	Bi-curvo 90° / 50°	0.14	ZB05-14	Corneoescleral	1474
	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	Corneoescleral	1001
	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1404
	15cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1404S
	15cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1482
	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20	Corneoescleral	2000
	30cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1406
	15cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1406S
	6cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1468S
	15cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1452
	30cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	Corneoescleral	2002
	15cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	Corneoescleral	2002S
	30cm	Espatulada	7.0	½ 180°	0.14	ZH07-14	Corneoescleral	1410
	15cm	Espatulada	7.0	½ 180°	0.14	ZH07-14	Corneoescleral	1410S
	20cm		4.0	3/8 135°	0.10	TE04-10	Conjuntiva, para Glaucoma	1053S
	20cm		5.0	3/8 135°	0.10	TE05-10	Conjuntiva, para Glaucoma	1052S
	30cm		5.5	7/16 158°	0.14	TG055-14	Conjuntiva, para Glaucoma	1475
	45cm		6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	Conjuntiva, para Glaucoma	1459

9 – 0 (0.3 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA				CÓDIGO	APLICACIÓN Y/O USO	REF
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)			
Nylon Monofilamento Negro	30cm	Espatulada	5.0	Bi-curvo 90° / 50°	0.14	ZB05-14	Corneoescleral	1402
	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Corneoescleral	1405
	30cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	Corneoescleral	1407
	15cm	Espatulada	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-10	Corneoescleral	1407S

	30cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-14	Corneoescleral	2003
	15cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-14	Corneoescleral	2003S

8 – 0 (0.4 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACIÓN Y/O USO	REF
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Nylon Monofilamento Negro	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	Escleral	1421
	30cm	Espatulada	6.5	1/4 90°	0.20	ZK065-20	Escleral	2054
	30cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	Escleral	2056
	30cm	Espatulada	7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20	Escleral	2028
	50cm		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	Piel	2461
	50cm		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	Piel	2461S

7 – 0 (0.5 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACIÓN Y/O USO	REF.
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Nylon Monofilamento Negro	30cm	Espatulada	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	ESCLERAL	1457
	30cm	Espatulada	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	ESCLERAL	2058
	45cm	Espatulada	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	ESCLERAL	2855
	45cm		7.0	3/8 135°	0.24	RE07-24	PIEL	2455S
	50cm		9.0	3/8 135°	0.24	RE09-24	PIEL	2457S
	30cm		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	PIEL	2463
	30cm	lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33	PIEL	3361
	45cm	lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33	PIEL	3361S
	50cm	lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	PIEL	3364
	50cm	lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	PIEL	3364S
	30cm		15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	Reposición palbebral	3365
Nylon Monofilamento Claro	30cm		15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	Reposición palbebral	3388

6 – 0 (0.7 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACIÓN Y/O USO	REF.
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Nylon Monofilamento Negro	45cm	Espatulada	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	Escleral, músculo ocular	2854
	45cm	Espatulada	8.0	7/16 158°	0.28	ZE08-28	Escleral, músculo ocular	2859
	30cm		13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	Piel, músculo ocular	2808
	20cm		13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	Piel, músculo ocular	2808S
	30cm	Lancet	7.0	3/8 135°	0.33	PE07-33	Piel, músculo ocular	3379S
	50cm	Lancet	8.0	1/2 180°	0.33	PH08-33	Piel, músculo ocular	3362S
	45cm	lancet	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	Piel, músculo ocular	3381S
	50cm	lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	Piel, músculo ocular	3382
	45cm	lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	Piel, músculo ocular	3382S
	45cm	lancet	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-33	Piel, músculo ocular	3853S
	45 cm	Lancet	13.0	1/2 180°	0.33	PH13-33	Piel, músculo ocular	3363S
	30cm		15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	Reposicion palpebral	3386
Nylon Monofilamento Claro	50cm	Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	Piel, músculo ocular	3387

6 – 0 (0.7 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACIÓN Y/O USO	REF.
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Seda Negra Trenzada	45 cm		8.0	5/6 113°	0.28	RI08-28	Piel, músculo ocular	2805
	45 cm		11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	Piel, músculo ocular	3305
	45 cm		11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	Piel, músculo ocular, de control	3305S
	55 cm	lancet	10.0	3/8 135°	0.33	PE-10- 33	Piel, músculo ocular, de control	3366
	55 cm		13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	De control	3356
	55 cm		13.0	3/8 135°	0.33	YE13-33	De control	3353
	60 cm		14.0	3/8 135°	0.38	YE14-38	De control	3850S

5 – 0 (1.0 metros)

SUTURA OFTALMICA		AGUJA					APLICACIÓN Y/O USO	REF.
DESCRIPCION	LONGITUD	FORMA	LONGITUD (mm)	CURVATURA	DIÁMETRO (mm)	CÓDIGO		
Nylon Monofilamento Negro	30 cm	Espatulada	6.0	1/4 90°	0.28	ZK06-28	Escleral, músculo ocular	2806
	45 cm	Espatulada	7.0	3/8 135°	0.28	ZE07-28	Escleral, músculo ocular	2865
	45 cm	Espatulada	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	Escleral, músculo ocular	2856
	45cm	Espatulada	6.0	1/4 90°	0.28	XK06-28	Escleral, músculo ocular	2807
	45 cm	Lancet	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	Piel, músculo ocular	3383S
	50cm		11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38	Piel, músculo ocular	3854
	45 cm		11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38	Piel, músculo ocular	3854S