FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTO Y DISPOSITIVO MÉDICO CAARPO1-F1-V01

| | 1. DESC | CRIPCIÓN GENERAL | |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUCTO: | VANECE GEL PLUS ® | CONCENTRACIÓN: | N.A |
| ACTIVO: | Polisiloxano y Dioxido de Silicio | FORMA FARMACÉUTICA: | Gel |
| | 2. REC | GISTRO SANITARIO | |
| NUMERO: | INVIMA 2018DM-0018981 | MODALIDAD: | Importar y Vender |
| TITULAR: | Suiphar de Colombia S.A.S | FABRICANTE AUTORIZADO: | BIODUE SPA |
| VIGENCIA: | 26/11/2028 | IMPORTADOR: | Suiphar de Colombia S.A.S |

3. INDICACIONES

Indicado en el manejo de cicatrices, despues de que la herida ha sanado y la superficie de la piel este intacta. Previene el desarrollo de cicatrices en forma de Queloides y cicatrices hipertroficas causadas por procedimientos quirúrgicos generales ,heridas por trauma y quemaduras.

INSTRUCCIONES DE USO: Aplicar dos o más veces al día sobre la piel limpia y seca. Aplicar suavemente una capa muy delgada sobre el área afectada, que se desvanecerá aproximadamente en 4-5 minutos. Si después de este tiempo no se ha secado, probablemente haya aplicado una cantidad excesiva: proceder a retirar un poco para terminar el proceso.

4. CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS: Producto para uso en externo. No aplicar en heridas recientes o no completamente cerradas. No aplicar sobre las mucosas. No aplicar sobre o en concomitancia con tratamientos farmacológicos. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto accidental, lave con abundante agua. Si la irritación no pasa, consultar con un médico.

No utilizar en caso de hipersensibilidad o incompatibilidad con cualquiera de los componentes.

Uso prolongado del producto, como para todos los productos tópicos, pueden dar lugar a fenómenos de sensibilización o irritación local, si así fuera debe detener el tratamiento y consultar a su médico o farmacéutico. Si el producto no está seco puede manchar la ropa.

| | 5. PRESENTA | CIONES COMERCIALES | |
|-----------------|--|--------------------------|--|
| CÓDIGO ARTÍCULO | PRESENTACION | CUM | CÓDIGO DE BARRAS |
| 00035541 | Plegadiza x 1 tubo de 6 g | N.A | N.A |
| 00035540 | Plegadiza x 1 tubo de 15 g | N.A | 8030082001116 |
| 00035542 | Sachet x 3 g MM | N.A | N.A |
| | 6. OTRAS ESPE | CIFICACIONES TÉCNICAS | |
| VIDA ÚTIL: | 36 Meses | TIPO DE EMPAQUE: | Caja Plegadiza (Ancho:31 mm,Lomo: 3 mm,Alto: 106 mm) |
| ALMACENAMIENTO: | Conservese en un lugar fresco y seco lejos de fuentes de calor. | TIPO DE EMBALAJE: | Caja Corrugada |
| TIPO DE ENVASE: | Tubo Colapsible de Polietileno de baja Densidad; Tapa de Polipropileno | ACCESORIOS: | Inserto |
| FECHA: | A: 11/07/2019 | | |
| | Firma: | | Firma: |
| ELABORADO POR: | S.ALfonso Nombre: S.Alfonso | REVISADO Y APROBADO POR: | HATELOGO Nombre: Hademar Herazo |
| | Cargo: Inspectora de Calidad | | Cargo: Director Técnico |